

Baxter

機械器具 7. 内臓機能代用器
腹膜灌流用回路及び関連用具セット*

高度管理医療機器*	
承認番号*	20200BZY00463000
JMDNコード*	70592000*

CAPD UVフラッシュセット (UVフラッシュバッグ交換キット)


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】**

本品はUVフラッシュ接続チューブ（以下、「接続チューブ」という）と当社の透析液バッグ（以下、「透析液バッグ」という）を固定するために使用するキットです。本品はUVフラッシュコネクタカバーとマスクから構成されています。必ずUVフラッシュオート（以下、「UVフラッシュ」という）を用いて接続した透析液バッグと接続チューブの固定にご使用下さい。

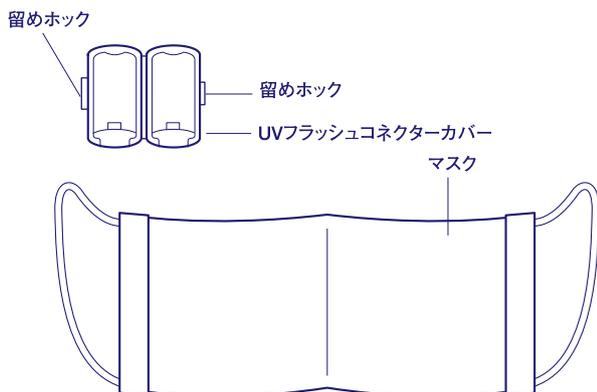

【使用目的】*

慢性腎不全患者の自己連続携帯式腹膜透析（CAPD）施行の際の、透析液注排液用ディスポーザブルセットとして使用する。

【操作方法又は使用方法等】*

ご使用前にUVフラッシュスタンダードシステムの操作手順書を必ずお読み下さい。

・本品に変色、ヒビ、変形、劣化、破損があった時は使用しないで下さい。

付け方

1. 本品の包装を開封し、マスクを付けます。
2. 使用中のUVフラッシュコネクタカバーの留めホックを外して開き、捨てます。
3. UVフラッシュを用いて、新しい透析液バッグを接続チューブに接続します。
4. UVフラッシュコネクタカバーの包装を開封し、UVフラッシュコネクタカバーを取り出します。
5. 接続チューブの溝にUVフラッシュコネクタカバーの凸部が入るように装着し、留めホックを閉じます。

外し方

1. 使用した透析液バッグを接続チューブより外す際、UVフラッシュコネクタカバーの留めホックを外して開き、捨てます。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

本品には殺菌消毒剤を使用しないで下さい。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

本品を当社以外の製品に使用した場合、当社では安全保証の責任を負いかねますのでご了承下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵方法

室温にて保管して下さい。

【包装】

30セット/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者（輸入元）

バクスター株式会社

〒104-6009 東京都中央区晴海一丁目8番10号

電話番号：03(6204)3700 [ダイヤルイン]

製造業者：バクスターヘルスケアS.A. (アイルランド)

Baxter Healthcare S.A. (Ireland)

製造販売元(輸入元)**

バクスター株式会社
東京都中央区晴海一丁目8番10号

JLRDPR-SID015