

管理医療機器**	
承認番号	20400BZY00131000
JMDNコード**	70371000**

機械器具 74. 医薬品注入器
自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット**
(輸液ポンプ用延長チューブ)**

インターリンクI.V.アクセスシステム
(シリンジ用セット)

再使用禁止

【警告】*


1. チューブを穿刺しないこと。[空気塞栓を引き起こす恐れがあるため。]
2. 中心静脈カテーテル、動脈カテーテルやその他の重要な箇所（偶発的な接続外れを起こした場合、重篤な症状もしくは死亡をまねく箇所）に使用されるラインと接続する場合は、ルアースリップアダプターを使用しないこと。[偶発的な接続外れが起こった場合、失血、空気塞栓などの合併症あるいは重要な治療の中断により、重篤な症状さらには死亡にいたる恐れがある為。]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】**

- ・本品は滅菌済みであり、発熱性物質は含まれていません。
- ・本品は可塑剤：DEHP：フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）を含まないポリ塩化ビニル（可塑剤：TOTM、トリメリット酸トリ - 2 - エチルヘキシル）を使用しております。

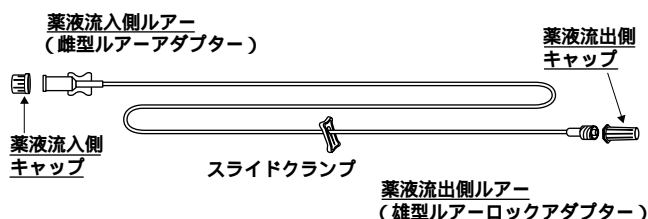

製品番号	製品名	プライミング量	全長
2N3345	シリンジ用セット Yサイトなしタイプ	0.33mL	91.4cm
2N3346	シリンジ用セット Yサイトなしタイプ	1.22mL	91.4cm
2N3348	シリンジ用セット Yサイトなしタイプ	0.50mL	152.4cm
2N3349	シリンジ用セット Yサイトなしタイプ	2.14mL	152.4cm

(プライミングの量と全長はおよその値です。)

【使用目的】**

動静脈路への薬液注入及び血液採取

【操作方法又は使用方法等】**

< 操作開始に際する注意 >

1. 使用前に包装が開封されていたり、破損がある場合は使用しないでください。
2. 使用前に本品に傷、割れ等使用上障害となるような欠点がないことを確認してください。
3. 輸送中、ルアー接続部分が外れかかっていることがあるかもしれません。使用前には、必ず接続部分がしっかりと締まっているか確認してください。
4. 無菌的に操作してください。

1. 雌型ルアーアダプターの薬液流入側キャップを必要に応じてはずしてください。
2. スライドクランプを必要に応じて開閉してください。

注意：チューブのスライドクランプを用いて、流量を調節しないでください。

3. 雌型ルアーアダプターを輸液セットに接続して、プライミングして、空気を取り除きます。

注意：本品内部には、絶対に空気が入らないようにしてください。

注意：中心静脈カテーテル、動脈カテーテルやその他の重要な箇所（偶発的な接続外れを起こした場合、重篤な症状もしくは死亡をまねく箇所）に使用されるラインと接続する場合は、ルアースリップアダプターを使用しないでください。

4. 雄型ルアーロックアダプターを留置針に接続します。

< 使用方法に関連する使用上の注意 >

チューブまたは接続部分を引っ張る等、過度の負荷をかけないでください。チューブ接続部分から漏れを生じる恐れや、チューブまたは接続部分が外れる恐れがあります。

・参考として、CDC（米国疾病管理センター）の血管内留置カテーテル関連感染予防のためのガイドラインに従って、本品を交換してください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

・医薬品の添付文書を確認後、使用してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
- 直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で室温にて保管してください。
2. 使用期限**
- 5年間（自己認証による）

【包装】**

製品番号	包 装 単 位	
	製 品	臨床試用医療機器
2N3345	50個入	10個入
2N3346	50個入	10個入
2N3348	50個入	10個入
2N3349	50個入	10個入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

バクスター株式会社
〒104-6009 東京都中央区晴海一丁目 8 番10号
連絡先：03(6204)3900（夜間・休日伝言承り電話）
製造業者：バクスター ヘルスケア社（米国）
Baxter Healthcare Corporation（United States of America）
バクスター ヘルスケア社（プエルトリコ）
Baxter Healthcare Corporation of Puerto Rico
（Commonwealth of Puerto Rico）
バクスターヘルスケア社（シンガポール）
Baxter Healthcare S.A.（Republic of Singapore）
バクスター ヘルスケア社（コスタリカ）
Baxter Productos Medicos Ltda.（Republic of Costa Rica）

BAXTER 及びインターリンクはバクスター・インターナショナル・インクの登録商標です

製造販売元
バクスター株式会社
東京都中央区晴海一丁目 8 番10号

JLMDIL-PID009