



*2017年7月 改訂（第2版）（新記載要領に基づく改訂）
2008年5月 作成（第1版）

コード番号 A2C9920

Baxter

承認番号 20400BZY00131000

機械器具 74. 医薬品注入器
管理医療機器 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 70371000

インターリンクI.V.アクセスシステム (輸液セット)

再使用禁止

【警告】


1. チューブを穿刺しないこと。[空気塞栓を引き起こすおそれがある。]
2. 中心静脈カテーテル、動脈カテーテルやその他の重要な箇所（偶発的な接続外れを起こした場合、重篤な症状もしくは死亡をまねく箇所）に使用されるラインと接続する場合は、ルアースリップアダプターを使用しないこと。[偶発的な接続外れが起こった場合、失血、空気塞栓等の合併症あるいは重要な治療の中断により、重篤な症状さらには死亡にいたるおそれがある。]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

*【形状・構造及び原理等】

- ・本品は滅菌済みで、発熱性物質を含有しない。
- ・本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用している。
- ・本品は、ガラス製、硬質プラスチック製および軟質プラスチック製輸液剤容器に適用する。
- ・本品は天然ゴムを使用していない。

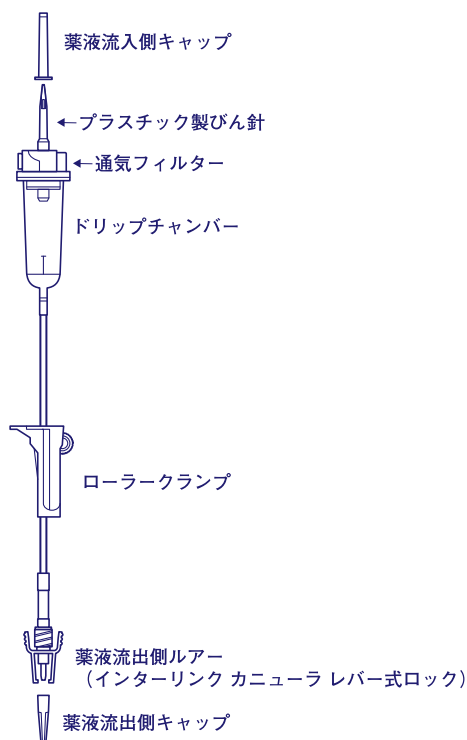

コード番号	タイプ名	全長
A2C9920	20滴タイプ	150cm

(全長はおよその値である。)

【使用目的又は効果】

動静脈路への薬液注入及び血液採取

*【使用方法等】

操作は無菌の方法により行う。

1. 本品を包装から取り出す。
2. ローラーランプを閉じる。
3. ガラス製又は硬質プラスチック製輸液剤に使用する場合は、ドリップチャンバー部通気フィルターのふたを開ける。輸液剤容器を下にして、プラスチック製びん針を垂直に挿入する。

【注意】 ガラス製又は硬質プラスチック製輸液剤容器への薬剤投与は、輸液セットを接続する前に行うこと。

4. 軟質プラスチック製輸液剤容器に使用する場合は、ドリップチャンバー部通気フィルターのふたを閉めて、プラスチック製びん針を挿入する。

【注意】 最適な輸液流量を得るために、使用する輸液剤容器に合わせて、ドリップチャンバー部通気フィルターのふたの開閉状態を確認する。

5. ドリップチャンバーを指でゆっくり押しつぶして離し、ドリップチャンバーの約3分の1（T字ライン）まで輸液剤をためる。

6. ローラーランプを開く。

7. 輸液セットをプライミングし、チューブ内の空気を取り除く。

【注意】 本品内部には、絶対に空気が入らないようにすること。

8. ローラーランプのローラーが最下部に達するまでローラーランプを閉じる。

9. 輸液セットの薬液流出側ルアー（インターリンク・カニューラレバー式ロック）を、インターリンク インジェクションサイトに挿入し接続する。なお、使用前に各部が確実に接続されていることを再確認すること。

10. 適切な輸液流量をセットするために、毎回、ローラーランプのローラーが最下部に達するまでローラーランプを閉じてから、ローラーランプを開く。開放状態から、ローラーランプを調整する場合には、同様な方法を繰り返す。

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

1. 輸送中、ルーアー接続部分からのチューブ外れが発生するおそれがあるため、使用前には、必ず接続部分がしっかりと締まっているか確認すること。
2. 本品のチューブ、または接続部分を引っ張る等、過度の負荷をかけること。[チューブ接続部分から漏れを生じるおそれや、チューブ又は接続部分が外れるおそれがある。]
3. ローラークランプで流量を調節、または閉じた後に、チューブを引っ張る、またはチューブが患者の身体の下に挟まれる等、ローラークランプが動くような過度の負担をチューブにかけないこと。[流量が変化するおそれがある。]
4. 本品の交換に際しては、感染防止に留意すること¹⁾。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で室温にて保管する。

*2. 有効期間等

使用期限は包装又は外箱に記載する（自己認証による）

*【主要文献及び文献請求先】

1. 主要文献

- 1) CDC（米国疾病管理センター）の血管内留置カテーテル関連感染予防のためのガイドライン

2. 文献請求先

バクスター株式会社
連絡先：03（6204）3900

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者（輸入元）：

バクスター株式会社
連絡先電話番号：03（6204）3900

製造業者：

バクスターヘルスケア社（アメリカ合衆国）
Baxter Healthcare Corporation

Baxter 及びインターリンクはバクスターインターナショナルインクの登録商標です

製造販売元（輸入元）

バクスター株式会社

07-19-00-0033