



2015 年 9 月 作成（第 1 版）

届出番号：23B1X00012000006

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 カテーテルコネクタ 32339000

ドボン用チューブ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 使用方法

脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含有する製剤、有機溶剤（アルコール等）、油性造影剤が本品に接触しないようにすること。[本品の樹脂素材に影響し、本品が損傷、破損等するおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

<構造図>

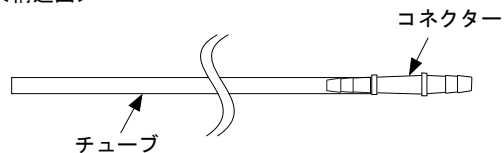

<製品仕様>

チューブ内径 4.0mm（チューブ長 400mm）
コネクター接続径 1/4～3/16 インチ

<原材料>

本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用している。
コネクターはポリカーボネートを使用している。

<併用機器>

販売名：ドボン（届出番号：23B1X00012000002）

【使用目的又は効果】

吸引器等を別の対象物（容器等）に接続するために用いる。

【使用方法等】

1. 本品を滅菌袋から取り出し、本品の外観に破損やひびなどの異常がないかを確認する。
2. 本品を容器等の吸引ポート又は吸引チューブに接続する。

【使用上の注意】

1. **重要な基本的注意**
 - ・必要に応じて適切な抗凝固処置を行うこと。
 - ・本品のチューブ側及びコネクター側の接続は、使用中の外れやリークに注意し、適宜、接続状態が維持されるように適切な処置を行うこと。
 - ・有機溶剤（アルコール等）、油性造影剤との接触により、ポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ（2-エチルヘキシル）が溶出するおそれがあるので、注意すること。

【保管方法及び使用期限等】

1. 使用期限
外箱に記載されている使用期限までに使用すること。
[自己認証（社内データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>
株式会社東海メディカルプロダクツ
TEL 0568-81-7954