


器具器械 6 9
一般医療機器 歯科技工用重合装置 JMDN35761000

トウィンクル L 2

【禁忌・禁止】

1. **目的以外の禁止**：歯科技工作業以外に使用しないこと。
2. **注意事項の厳守**：器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
3. **異常時の使用禁止**：異音や異常が発生した場合は、機器の使用を中止すること。
4. **改造の禁止**：機器の改造をしないこと。
5. **ランプ直視の厳禁**：照射中にふたを開けてランプを直視しないこと。

【形状・構造等】

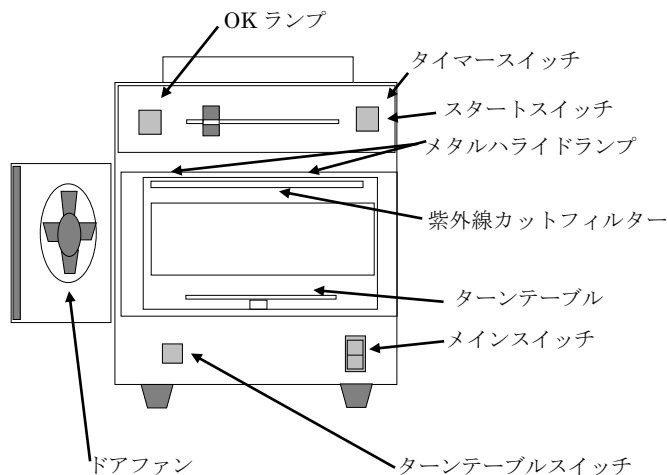

【性能・使用目的】

1) 性能

- ① ランプ：HID メタルハライドランプ 150W×2
- ② タイマー：0～5 分
- ③ ターンテーブル：6rpm
- ④ 電源入力：100v (50Hz/60Hz)
- ⑤ 消費電力：500W
- ⑥ 寸法：210(W)×300(D)×300(H)mm
- ⑦ 重量：7.0kg

2) 使用目的、用途

歯科用光重合樹脂の重合

【操作方法又は使用方法等】

1) 操作方法

詳細な使用方法是取扱説明書を参照すること。

2) 設置上の注意

安定した、振動しない台の上に設置すること。

【作動・動作原理】

取扱説明書を参照すること。

【使用上の注意】

詳細な使用方法是取扱説明書を参照すること

1) 熟練したもの以外は機器を使用しないこと。

2) 機器を使用する前の注意

- ① スイッチの接触状態、タイマーの作動、各部の点検を行い装置が正確に作動することを確認すること。
- ② アースが完全に接続することを確認すること。
- ③ 全てのコードが正確に且つ安全であることを確認すること。
- ④ 本体内に、目的以外の物を入れないこと。

作動中の注意

- ⑤ 異音、異常な振動が発生した場合、直ちにメインスイッチを切るか電源コード抜くこと。
 - ⑥ ふたが指定の位置まで確実に閉まってから、光照射を開始すること。
 - ⑦ 光照射中は、絶対にドアを開けないこと。
 - ⑧ 点灯中のランプは絶対に直視しないこと。
 - ⑨ 光を直接皮膚にあてないこと。
- 3) 故障した場合の注意
- ① 使用を中止し電源コードを抜くこと。
 - ② 勝手にいじらず適切な指示を行い、修理は専門家にまかせること。

【貯蔵・保管方法】

取扱説明書を参照すること

1) 貯蔵、保管方法

- ① 水のかからない場所に保管すること。
- ② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分が含まれた空気などによる悪影響が生ずる恐れが無い場所に保管すること。
- ③ 傾斜、振動、衝撃(運搬時も含む)などに対する安全状態に注意すること。
- ③ 科学製品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2) 機器の使用後は、次の事項に注意すること。

- ① 定められた手順により操作スイッチ、ダイヤルなどを使用前の状態に戻したのちに電源を切ること。
- ② コードの取り外しに際しては、コードを持って抜くなど無理な力をかけないこと。
- ③ 付属品、コードなどは清掃した後、整理してまとめておくこと。
- ④ 機器は次回の使用に支障が無いように、必ず清掃しておくこと。
- ④ 故障したときは、勝手にいじらず適切な指示を行い、修理は専門家にまかせること。

【保守・点検にかかわる事項】

詳細に関しては、取扱説明書を参照すること。

- ① 機器及び部品は、必ず定期点検を行うこと。
- ② しばらく使用しなかった機器を使用するときには、使用前に装置が正常且つ、安全に作動することを確認すること。

【包装】

本体、マグネットクリップ 1 個 マグネットハンガー 1 個

【製造販売会社及び製造業者の氏名、名称及び住所等】

製造販売業者名：東邦歯科産業株式会社
住所：〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内容 2-10-2
電話番号：048(864)2715
FAX 番号：048(866)6969
e-mail：toho@jt7.so-net.ne.jp
許可番号：11B3X00060

取扱説明書を必ずご参照ください。