

器 6 6 歯科用錬成器
一般医療機器 歯科用印象材混こう器 JMDN3879000


アルギマスター 2

【禁忌・禁止】

- ①目的以外の禁止：歯科用印象材及び石膏の錬和以外に使用しないこと。
- ②注意事項の厳守：器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
- ③異常時の使用禁止：異音や異常が発生した場合は、機器の使用を中止すること。
- ④改造の禁止：機器の改造をしないこと。

【形状・構造及び原理】

①形状・構造

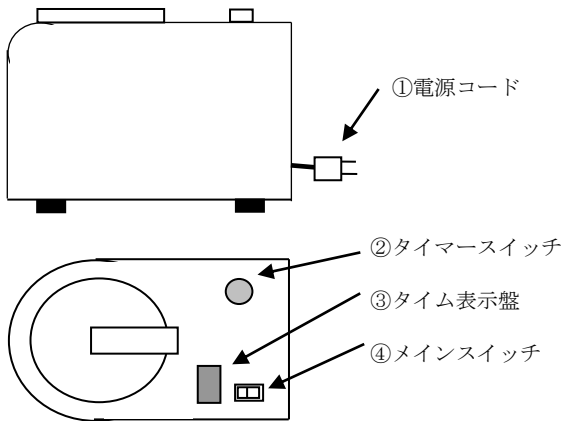

- ② 原理 電動式でモーターの回転による遠心力により、印象材を練成する。

【使用目的、効能又は効果】

使用前にチェアサイドですぐに印象材を混ぜ合わせるために使う電動式器具であり、均一で気泡のない練和が出来る。

【品目仕様等】

- 外観：目立った傷及び汚れ損がないこと。
 作動：正常にモーターが回転すること。
 設定時間モーターが回転し、設定時間終了後、停止すること。
 回転中にフタを開けると、回転が停止すること。
 作動中に、異常な振動、音が発生しないこと。

③仕様

- ①最大錬和量：150g
- ②タイマー：0～35 秒
- ③電源入力：100v (50Hz/60Hz)
- ④消費電力：Ⅱタイプ 100W
Ⅴタイプ 130W
- ⑤寸法：190 (W) × 220 (D) × 180 (H) mm
- ⑥重量：21kg

【操作方法又は使用方法等】

- ①メインスイッチを入れる。
- ②印象材と水をカップに入れてフタを閉める。
- ③本体内にカップをセットし本体フタを閉じる。
- ④練成照射時間を設定する。
- ⑤スタートボタンを押して練成照射を開始する。
- ⑥練成時間が終了したら、本体から練和カップを取り出す。
- ⑦作業が終了したらメインスイッチを切る。

【使用上の注意】

- ①使用前の注意：各部の点検（保守・点検に係る事項参照）を行うこと。
- ②使用中の注意：異音、異臭、異常な振動その他不具合が発生した場

合、使用を直ちに中止し製造メーカーに連絡すること。

- ③歯科医療有資格者かつ、器具の使用に熟知した者以外使用しない
- ④印象材・石膏を練成し、目的以外のものを練成しないこと。
- ⑤カップには、最大 150 g 以上入れないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ① 水のかからない場所に保管すること。
- ② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分が含まれた空気などによる悪影響が生ずる恐れが無い場所に保管すること。
- ③ 傾斜、振動、衝撃（運搬時も含む）などに対する安全状態に注意すること。
- ④ 化学製品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守点検に係る事項】

- 1) 使用前用後に、破損・ヒビ・キズ・変色。腐食・稼動部の動き等に異常がないことを確認すること。
- 2) 機器の使用後は、次の事項に注意すること。
 - ① 定められた手順により操作スイッチ、ダイヤルなどを使用前の状態に戻したのちに電源を切ること。
 - ② コードの取り外しに際しては、コードを持って抜くなど無理な力をかけないこと。
 - ③ 付属品、コードなどは清掃した後、整理してまとめておくこと。
 - ④ 機器は次回の使用に支障が無いように、必ず清掃しておくこと。
 - ⑤ 故障したときは、勝手にいじらず適切な指示を行い、修理は専門家にまかせること。弊社以外の修理業者へ修理を依頼した場合は、修理の対象箇所、回数に係らず一切の責任を負いかねます。

【包装】

本体、練和カップ 3 個 プラスチックスパチュラ 3 本

【機種】

アルギマスターⅡ
 アルギマスターⅡ-S T
 アルギマスターⅡ-E X

【製造販売業社及び製造業者の氏名、名称及び住所等】

製造販売業者名：東邦歯科産業株式会社
 住所：〒336-0034
 埼玉県さいたま市南区内容 2-10-2
 電話番号：048 (864) 2715
 F A X 番号：048 (866) 6969
 e-mail：toho@jt7.so-net.ne.jp
 許可番号：11B3X00060