

器 6 9 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 JMDN35761000


トウィンクルビグーLED

【禁忌・禁止】

1. 目的以外の禁止：歯科技工作業以外に使用しないこと。
2. 注意事項の厳守：器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
3. 異常時の使用禁止：異音や異常が発生した場合は、機器の使用を中止すること。
4. 改造の禁止：機器の改造をしないこと。
5. ランプ直視の厳禁：照射中にふたを開けてランプを直視しないこと。

【形状・構造及び原理】

① 形状・構造

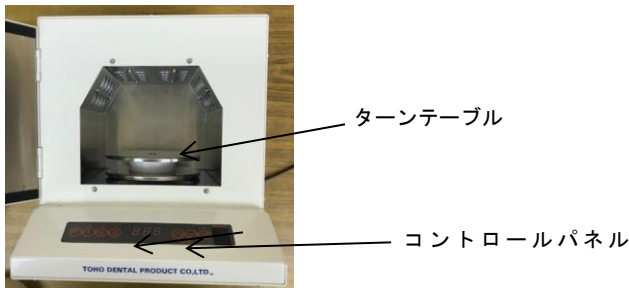

コントコントロールパネル説明



タイマースイッチ タイマー時間 タイマー設定 メインスイッチ

- ② 原理 電源基盤制御回路によるLEDランプ点灯と、電子回路による照射時間の制御。

【使用目的、効能又は効果】

歯科技工室で、高分子材料を重合するために用いる装置で、光重合型材料に光照射し重合硬化させる。

【品目仕様等】

- ① 外観：目立った傷及び汚れ損がないこと。
- ③ 動：ランプが点灯し、設定時間終了後消灯すること。
- ③仕様
 - 1) ランプ：LED ランプ 32 本
 - 2) タイマー：1～999 秒 3 種類
 - 3) ターンテーブル：15rpm
 - 4) 電源入力：100v (50Hz/60Hz)
 - 5) 消費電力：200W
 - 6) 寸法：240(W)×280(D)×270(H)mm
 - 7) 重量：6.2kg

【操作方法又は使用方法等】

- ①メインスイッチ ON にする。
- ②ターンテーブルの ON-OFF を設定する
- ③技工所物をターンテーブルの上に置く
- ④照射時間を設定する。
- ⑤スタートボタンを押して照射を開始する。
- ⑥作業が終了したらメインスイッチを切る。

【使用上の注意】

使用上の注意

- ①各部の点検（保守・点検に係る事項参照）を行うこと。
- ②ランプを直視しないように注意すること
- ③点灯中のランプは高温が発生するため絶対に触らないこと。
- ④ランプは使用時間、点灯回数で光量が減衰するので適宜交換すること。
- ⑤異音、異臭、その他不具合が発生した場合、使用を直ちに中止し製造メーカーに連絡すること。
- ⑤. 歯科医療有資格者かつ、器具の使用に熟知した者以外使用しないこと。
- ⑥歯科技工所以外の目的に使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ① 水のかからない場所に保管すること。
- ② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分が含まれた空気などによる悪影響が生ずる恐れが無い場所に保管すること。
- ③ 傾斜、振動、衝撃（運搬時も含む）などに対する安全状態に注意すること。
- ④ 化学製品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守点検に係る事項】

- 1) 使用前用後に、破損・ヒビ・キズ・変色。腐食・稼動部の動き等に異常がないことを確認すること。
- 2) 機器の使用後は、次の事項に注意すること。
 - ① 定められた手順により操作スイッチ、ダイヤルなどを使用前の状態に戻したのちに電源を切ること。
 - ② コードの取り外しに際しては、コードを持って抜くなど無理な力をかけないこと。
 - ③ 付属品、コードなどは清掃した後、整理してまとめておくこと。
 - ④ 機器は次回の使用に支障が無いように、必ず清掃しておくこと。
 - ⑤ 故障したときは、勝手にいじらず適切な指示を行い、修理は専門家にまかせること。弊社以外の修理業者へ修理を依頼した場合は、修理の対象箇所、回数に係らず一切の責任を負いかねます。

【包装】

本体 着脱式ターンテーブル 1 個 マグネットハンガー 1 個
マグネットクリップ 1 個

【製造販売業社及び製造業者の氏名、名称及び住所等】

製造販売業者名：東邦歯科産業株式会社
住所：〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内容 2-10-2
電話番号：048(864)2715
FAX 番号：048(866)6969
e-mail：toho@jt7.so-net.ne.jp
許可番号：11B3X00060

製造業者：東邦歯科産業株式会社

取扱説明書を必ずご参照ください。