


歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN 70907000

PDR 布バフレギュラー

【形状・構造及び原理】

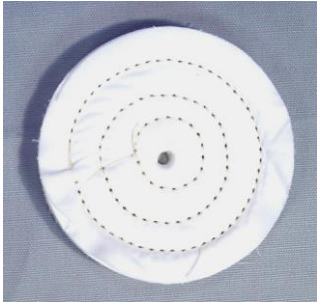

直径 80mm 厚さ 10mm
中心の直径 3mm の穴
ホイール状 綿
歯科用レーズにセットし回転させて使用する

【使用目的、効能又は効果】

歯科用レーズに装着して回転させ、歯科用金属及びレジン床、スルフォン床等の歯科補綴物の仕上げ、艶出しに用いる。

【品目仕様等】

外観に目立った汚れ、糸のほつれ等がないこと。
中心に直径 3mm の穴が開いていること。
歯科補綴物の研磨、艶出しが容易に行われること。

【操作方法又は使用方法等】

歯科用レーズに装着して回転させ、使用目的に適合した歯科用研磨材を付着し研磨作業を行う。歯科用レーズの回転速度は、使用目的に合わせ調整する。

【使用上の注意】

- 1) 使用前の注意：歯科用レーズに確実に固定する。
- 2) 作業中は、防塵マスク、フェイスガード、安全メガネ等を着用し、防塵の対策を行うこと。
- 3) 使用目的に合った歯科用研磨剤を使用すること。
- 4) 本品は、使用目的以外に使用しないこと。
- 5) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法】

- 1) 貯蔵、保管方法
 - ① 水のかからない場所に保管すること。
 - ② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン成分が含まれた空気などによる悪影響が生ずる恐れが無い場所に保管すること。
 - ③ 化学製品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
 - ④ 本品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。
- 2) 使用後の注意：使用後は、付着している、研磨剤等を除去し清掃すること。
- 3) 使用期間等：本品は、使用有効期間等を特別定めていない為長時間使用により、材質の疲労、磨耗等で安全性が低下する場合があります。安全管理上、適時新しい物と交換してすること。

【保守・点検に係る事項】

- ① 使用前・使用後の点検：使用前・使用後に、破損、変形、変色等の異常がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

- ② 機器は次回の使用に支障が無いように、必ず清掃しておくこと。

【包装】

PDR 布バフレギュラー 2 個入り包装

【製造販売会社及び製造業者の氏名、名称及び住所等】

製造販売業者名：東邦歯科産業株式会社

住所：〒336-0034

埼玉県さいたま市南区内容 2-10-2

電話番号：048 (864) 2715

FAX 番号：048 (866) 6969

e-mail：toho@jt7.so-net.ne.jp

許可番号：11B3X00060