

## 多項目自動血球分析装置 XE-2100D


### 【警告】

サンプルをご使用の場合、サンプル測定動作中は、手で測定ラインまでラックを押し込まないでください。ごく稀に検体番号と測定結果がずれることがあります。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 構成

本装置は測定部本体 (CP据置バーコードリーダー内蔵)、サンプルまたはコンベアシステム、データ処理部および空圧源で構成されています。

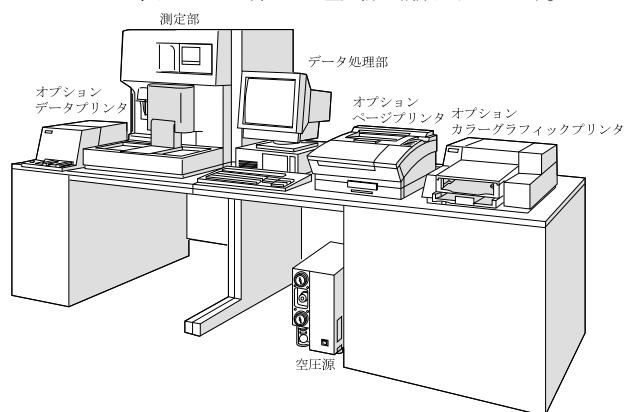

オプションとしては 100 検体サンプル(またはコンベアシステム)、エアフィルタ、排液監視ユニット、消音ボックス、後面カバー。ハンディーバーコードリーダー、データプリンタ、カラーグラフィックプリンタ、レーザープリンタ、患者情報プログラム、本体 2 台接続プログラム、アップグレードプログラム XE pro があります。

各部の機能を十分理解してお使いください。

#### 2. 電気的定格

外部電源供給用主電源：

110V/117V/220V/240V 各±10%, 50/60 Hz

消費電力： 550 VA以下

※詳細は本装置の取扱説明書 測定部編「第 1 章 XE-2100L/XE-2100D について」を参照してください。

#### 3. 形状及び寸法

	寸法(mm) (幅×高さ×奥行き)	重量(kg)
測定部本体 (CP 内蔵)	706×535×711	約 81
空圧源	195×395×333	約 15.5
サンプル	580×377×195	約 12

- ・寸法許容幅は上表の値±3%とする。また、突起物は含まない。
- ・重量許容幅は上表の値±10%とする。

#### 4. 機能及び動作原理

本装置は、シーフローDC 検出法、半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法およびSLS-ヘモグロビン法により、測定を行います。

##### 1. シーフローDC 検出法

検出器内は試料ノズルがアパーチャの前に配置され、センターが合わされています。希釈試料が試料ノズルから円すい形のチャンノ内に押し出されると、試料はフロントシー液に包まれアパーチャ中央部を通過します。

アパーチャ通過後、希釈試料はバックシー液に包まれ回収管へと送り込まれます。これにより、この領域での血球の舞い戻りを防止し、疑似血小板パルスの発生を防ぎます。このシーフロー方式により血球計数の正確度と再現性が向上します。また、血球が一列に並んでアパーチャを通ることから、異常な血球パルスの発生も防止されています。

##### 2. 半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法

サイトメトリーとは細胞やその他の生物学的な粒子の物理的な性質や科学的な性質を測定することであり、フローサイトメトリー (flow cytometry) は細い流れの中をこれらの細胞や粒子を通過させて測定を行うための方法です。血液試料は吸引定量され、規定倍率で希釈、染色させた後、シーフロー機構により、フローセル内へ送り込まれます。

このシーフロー機構により、血球計数の正確度と再現性を向上させ、かつ血球粒子が一列に並んでフローセル中央部を通過することから、異常な血液パルスの発生を防止し、フローセルの汚れを減少させています。

フローセル内を通過する血球に半導体レーザー光を照射して発せられる前方散乱光をフォトダイオードで、側方散乱光と側方蛍光をフォトマルで受光し、電気パルスに変換し検出することにより血球の情報を得ることができます。

##### 1) 前方散乱光、側方散乱光

光の進行途中に粒子などの障害物が存在すると、光がそれを中心にしたさまざまな方向に広がります。この現象は光散乱と呼ばれています。この散乱光を検出することにより、微粒子の大きさや材質に関する情報を得ることができます。

血球粒子にレーザー光が照射された場合も同様に、血球粒子による光の散乱が起こります。

散乱光の強度は、粒径および観測する角度などに依存しますが、本装置では、血球の大きさ情報を反映する前方散乱光と血球の内部情報 (核の大きさなど) を反映する側方散乱光を検出します。

##### 2) 側方蛍光

染色された血球のような蛍光物質に光を照射しますと、照射した光の波長より長い波長の光を發します。この蛍光の強度はよく染色されれば強くなります。この蛍光を検出することにより血球の染色度合に関する情報を得ることができます。

取扱説明書を必ず参照してください。

蛍光は全ての方向に発せられるので、XE-2100D ではこの蛍光のうち側方に発せられる側方蛍光を検出しています。

### 3. SLS-ヘモグロビン法

従来、自動化法におけるヘモグロビンの測定は、シアンメトヘモグロビン法またはオキシヘモグロビン法による測定が主流となっていました。しかし、XE-2100Dのような大型全自動器にとって一長一短があります。

SLS-ヘモグロビン法は、この両者の長所を活かした測定法です。

SLS-ヘモグロビン法は、オキシヘモグロビン法と同様、血液ヘモグロビンの転化反応が迅速で毒劇物を含有していないため、自動化法に適しています。

また、メトヘモグロビンの測定が可能のため、コントロール血液のようなメトヘモグロビンを含んだ血液も正確に測定することができます。

※詳細は本装置の取扱説明書 測定部編「第7章 原理」を参照してください。

#### 【使用目的又は効果】

##### 1. 使用目的

電気抵抗により血球を計測する装置

#### 【使用方法等】

##### 1. 設置方法

###### 1) 設置条件

- ①水のかかからない所に設置してください。
- ②必ず接地をしてご使用ください。
- ③高温、高湿、ホコリ、直射日光などの悪影響を受けないところに設置してください。
- ④設置時及び運搬時に強い振動や衝撃をあてないように注意してください。
- ⑤化学薬品の保管場所や換気の悪い場所に設置しないでください。

###### 2) 使用環境条件

- ①周囲温度は15～30℃(最適使用温度25℃)、相対湿度は30%～85%の範囲内で使用してください。
- ②環境温度、湿度に適応しない場合、空調管理してください。

##### 2. 使用方法

###### 1) 測定準備

- ①試薬の点検と交換  
試薬量を確認し、不足している場合には交換します。
- ②電源の投入  
測定部本体ならびに周辺機器の電源を投入してください。
- ③装置の点検  
電源スイッチを入れると装置は自己診断を行います。
- ④精度管理  
コントロール血液やその他の精度管理手法により、データをチェックします。

###### 2) 測定

<マニュアルモードによる測定>

- ①測定検体の血液量を確認し、よく攪拌します。

- ②スタンバイ表示を確認後、採血管をピペットの下へ持っていき、全血吸引ピペットの先端が採血管の底に当たるまで挿入してください。

- ③スタートスイッチを押すとランプが点滅し、全血吸引ピペットから血液が一定量吸引されます。

- ④アラーム音がなってから採血管を全血吸引ピペットからはずします。血液は自動的に希釈・溶血・染色され計数、解析されます。

<サンプリングモードによる測定 (オプション) >

- ①ラックに試験管を並べサンブラにセットします。1ラックには採血管を10本までセットできます。

- ②スタンバイ表示を確認後、サンブラ測定キーを押し、スタートさせます。

- ③装置は自動的に血液の有無を判断して攪拌、吸引、測定を行います。

- ④サンブラにセットされた試料の測定が全て終了すれば、自動的に停止します。また、サンブラ動作中に緊急検体の依頼があれば、サンブラ動作を中断し、マニュアルモードによる割り込み測定が可能です。

<クローズド測定 (オプション) >

- ①クローズド測定の詳細については、本装置の取扱説明書 測定部編「第2章 検体の測定」を参照してください。

<キャピラリーモードによる測定>

- ①測定検体の血液量を確認し、希釈液で血液を5倍に希釈、攪拌します。

- ②スタンバイ表示を確認後、キャピラリー測定モードを選択し、全血吸引ピペットの先端が容器の底に当たるまで挿入してください。

- ③スタートスイッチを押すとランプが点滅し、全血ピペットから血液が一定量吸引されます。

- ④アラーム音がなってから容器を全血吸引ピペットからはずします。血液は自動的に希釈・溶血・染色され計数、解析されます。

###### 3) 測定結果

- ①測定が終了すると測定結果がデータ処理装置の画面に表示されます。接続された外部プリンタを使用することで検査伝票等にデータを印字することができます。コンピュータに測定結果を転送することも可能です。

###### 4) 測定終了後の処理

- ①洗浄  
シャットダウン処理でセルクリーンを吸引させることにより、本体内部の洗浄が行われます。

- ②電源オフ  
シャットダウン処理終了後、電源スイッチを切ります。

## 5) 定期保守

- ①コントロール血液やその他の精度管理手法により、定期的に精度管理を実施し、測定値の信頼性を確保します。また定められた保守項目を定期的に行い、装置を安定した状態に保ってください。

※詳細は本装置の取扱説明書 測定部編「第2章 検体の測定」を参照してください。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意事項

- 1) サンプラをご使用の場合、以下の項目について注意してください。ごく稀に検体番号と測定結果がずれることがあります。

- ①検体へのバーコードラベルの貼り方には注意してください。

※詳細は本装置の取扱説明書 測定部編「第2章 検体の測定」を参照してください。

- ②サンプラの右槽、左槽および測定ラインに汚れや異物が無いことを確認してください。

- ③ラックの底に汚れや異物が付着していないか、また、損傷や変形していないことを確認してください。

- ④ハンドクリップに汚れや異物が付着していないか、また、損傷や変形していないことを確認してください。

※詳細は本装置の取扱説明書 測定部編「第3章 装置の保守とサブライ部品の交換」を参照してください。

- ⑤サンプラ測定動作中は、CPカバーに触れたり、CPカバーを外したりしないでください。

- ⑥サンプラ測定動作中は、手で測定ラインまでラックを押し込まないでください。

- ⑦サンプラ測定動作中は、測定ライン上のラックには、触れないように注意してください。

- ⑧サンプラ測定動作中に、「ラック送り込み動作異常」「ラック横送り動作異常」「ラック送り出し動作異常」のエラーが発生したときには、検体番号と測定結果にずれが発生していないか、測定ライン上のラックおよび送り出された直後のラックに挿入している全ての検体の測定結果を確認してください。

※詳細は本装置の取扱説明書 測定部編「第5章 トラブルシューティング」を参照してください。

#### 2. 一般的注意事項

- 1) 本機器の使用経験の全くない方は単独で使用しないでください。
- 2) 本機器は、スクリーニング用の検体検査機器です。測定結果に基づく臨床判断は、臨床症状や他の検査結果等と合わせて医師が総合的に判断してください。
- 3) 本機器は精密な測定機器であり、機器の近傍で携帯電話等の使用等、電磁環境下での使用をしないでください。測定結果に影響を与える恐れがあります。
- 4) 故障したときは、取扱説明書に明示された範囲で責任者が処置をし、それ以外の故障修理は専門家にまかせてください。

#### 3. その他の注意

- 1) コントロール血液等を用いて精度管理を実施してください。
- 2) 精度管理は、少なくとも1日1回以上実施し、装置が正常に動作していることを確認してください。
- 3) 使用試薬の開封後は、ホコリ・ゴミや菌等が入らないように注意してください。
- 4) 使用期限を過ぎた試薬を使用しないでください。
- 5) 機器の使用前後には機器の状態を確認してください。

##### ①使用前

試薬残量、配管やコードの接続をチェックしてください。

##### ②使用時

サンプルに直接触れないよう、手袋を着用してください。

装置全般にわたって、異常がないか、たえず監視してください。

##### ③使用后

シャットダウン操作を行い、操作スイッチ、ダイヤルなどを使用前の状態にもどしたのち、電源を切ってください。

#### 4. 廃棄方法

- 1) 本装置を廃棄されるときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令及び地方自治体の条例に従って処理してください。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

装置は常温・常湿で保管してください。

これよりも過酷な条件で貯蔵・保管される場合は、装置内流露の試薬を完全に水抜きする必要がありますので、当社支店・営業所へ相談してください。

#### 2. 有効期間・使用の期限（耐用期間）

使用開始(据付)後5年：自己認証(当社データによる)

#### 3. 保守部品の基本保有期間

販売中止後8年

但し、保守部品の製造あるいは調達が可能となり、上記保有期間を保持しない場合は、別途ご連絡いたします。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 1. 使用者による保守点検事項

- 1) 約24時間に一度、シャットダウンの実行（検出器チャンバおよび希釈ラインの洗浄を自動で行います。）および空圧源の逆流防止チャンバの水量確認と水抜きを行ってください。
- 2) 30000 検体測定ごとにサンプリングバルブを洗浄してください。

3) 必要に応じて、次の箇所の洗浄/清掃を行ってください。

マニュアル洗浄スピッツの洗浄/サンプリングバルブ受皿の洗浄/ピアサ部トレイの洗浄/ツマリ除去 (ツマリ除去シーケンス) /RBC 検出器ペレットの洗浄/光学式検出部フローセルの気泡除去/光学式検出部フローセルの洗浄/排液容器の交換 (排液容器を設置している場合のみ)

4) 必要に応じて次のサブライ部品の交換を行ってください。

試薬の交換/ピアサの交換/ハンドクリップの交換/  
ゴム板No. 39の交換/滅菌フィルタの交換/ヒューズの交換

5) 必要に応じて次の保守を当社の技術員、または当社の認定する技術員にご用命ください。

①約1.5~2年ごと、または300万回動作ごとにEPK 補給用ダイアフラムポンプユニットの交換を行ってください。

②約2年ごと、または225万回動作ごとにWBC シースシリンジの交換を行ってください。

少なくとも1年ごとに当社の技術員、または当社の認定する技術員による定期保守点検を行い、交換の必要な部品は交換してください。保守契約にご加入されることをお薦めします。

※詳細は本装置の取扱説明書 測定部編「第3章 装置の保守とサブライ部品の交換」を参照してください。

## 2. 業者による保守点検事項

作業内容には概略以下のものが含まれます。

- ・コンプレッサの交換

### \* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元] [製造元]

シスメックス株式会社

神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1 〒651-0073

Tel 078-265-0500

緊急連絡先：0120-413-034

(カスタマーサポートセンター)

受付時間：月～金曜日(祝祭日を除く)09:00～17:35