

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 カテーテルコネクタ 32339000

NEXUS コネクタ

再使用禁止

【警告】

使用方法

本品にアルコール、フェノールを含む薬液又は消毒液を適用しない。[ひび割れを生じる恐れがある。]

【禁忌・禁止】

再使用禁止

再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

組成

1. 血液体液等に接触する部分：薬液の通過箇所
2. 組成：アクリニトリル・スチレン共重合体、イソブレンゴム

形状

本品は Epimed 社製カテーテル（19 ゲージ、21 ゲージ）に接続して使用するものである。



作動・動作原理

カテーテル挿入口へカテーテルの近位端を挿入し、回転軸のねじりによる物理的圧力を利用して把持する。

【使用目的又は効果】

使用目的

カテーテルを容器等の別の対象物に接続するために用いる器具である。

【使用方法等】

使用方法

1. 準備
包装を開封し、汚染しないように取り出す。
2. 接続
(1) 本体の回転軸がねじられた状態になっていることを確認する。
(2) カテーテル挿入口へカテーテルの近位端を挿入する。
(3) 本体の回転軸を凹凸がなくなるように（クリック音及びクリック感がするまで）ねじる。
(4) めす・ルアー部へ処置用器具を接続する場合、キャップを取り外す。
(5) めす・ルアー部へ処置用器具を接続しない場合、キャップを取り付ける。

使用方法に関連する使用上の注意

1. 本品・カテーテル間を定期的に軽く引っ張り、適切に接続されていることを確認する。
2. 本品に接続した処置用器具を取り外す際は、カテーテルの接続状態を維持するため、本品をしっかりと持つ。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 包装の開封後は速やかに使用する。
2. 使用中に患者や本品に異常を認めた場合、直ちに患者の安全を図るための処置を講じる。

不具合

重大な不具合

本品は、破損、液漏れ、カテーテルのはずれを生じる可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水漏れに注意し、直射日光、高温・多湿を避けて保管する。

耐用期間・使用期間

包装に記載する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：東京医研株式会社

東京都稲城市東長沼 1131-1

TEL:042-378-6630 FAX:042-378-6614

E-mail:info@tokyoiken.com

製造業者：Epimed International, Inc. (米国)