

歯科材料 09 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具 JMDN：70744000

ミリングバー

*【形状・構造及び原理等】

タングステンカーバイド製の作業部と軸部をもって
います。



*【販売単位】

- 1) 単品：1 本／箱（PVC 製ケース）
- 2) セット品：ミリングバーとスタイリー（雑品）を
セットとする。（PVC 製ケース及びポリ袋）
 - ① ベーシックセット
 - ・ミリングバー：4L, 2L, 1L, 2U 各 1 本
 - ・スタイリー：4L, 2L, 1L, 2U 各 1 本
 - ② コンプリートセット
 - ・ミリングバー：4L, 3L, 2L, 1L, 1XL, 0.5S, 2U,
3U, 2A, 0.6A, 3C 各 1 本
 - ・スタイリー：4L, 3L, 2L, 1L, 1XL, 0.5S, 2U,
3U, 2A, 0.6A, 3C 各 1 本
 - ③ アバットメントセット
 - ・ミリングバー：2A, 0.6A 各 1 本
 - ・スタイリー：2A, 0.6A, 1.6A, 0.48A 各 1 本

*【使用目的又は効果】

陶材、又は同種の材料の研削に使用します。

*【使用方法等】

*本品を歯科技工用電動ハンドピースに正しく装着し
通法により使用してください。

【使用上の注意】

1. 軸部を確実にチャックの奥まで挿入してください。
2. 使用前に予備回転を行い、振れが無いことを確認
してください。
3. 無理な角度や過度の加圧は避けてください。
- *4. 本品を使用する際は必ず吸塵装置を使用してくだ
さい。
- *5. 本品を使用する際は粉塵の影響を避けるため必ず
防塵メガネとマスクを使用してください。
- *6. 本品を他の目的に使用しないでください。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 水分、腐食性薬剤を避けて汚染を受けない状態で
保管してください。
2. 歯科の従事者以外が触れないように保管・管理し
てください。
- *3. 本品に明らかな疲労、磨耗等が見られた場合、ま
た、切削能力が落ちたと感じた場合は新しい製品
と交換してください。

*【保守・点検に係る事項】

使用前後にワイヤーブラシ等を用いて清掃してくだ
さい。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社

*住 所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2 - 5 - 12

*電 話 番 号：044 - 201 - 6171

**製 造 業 者：Zirkonzahn srl

製 造 国 名：イタリア