

歯科材料 08 歯科用石こう及び石膏製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 JMDN：34811000

リジッド

【禁忌・禁止】

アクリル樹脂にアレルギーのある人は手袋等防護を講じてください。

【形状・構造及び原理等】

1. 本品はシリンジ入りのペーストであり、ジメタクリレート樹脂を主原料とする。
2. アプリケーションチップを装着して使用する。



アプリケーションチップ

- *3. ペーストの硬さ、色調により以下の3種類があり、
1 シリンジ 3g 入りで、5本を1セットとする。
- ①リジッド (3g)
 - ②リジッド トランスペアレント (3g)
 - ③リジッド トランスペアレント+ ブルー (3g)

【原理】

歯科用模型及び修復物の築盛に用いるペーストであり、光照射により重合する。

【原材料】

ジメタクリレート樹脂、無機質フィラー、
反応開始剤、安定剤、顔料

【使用目的又は効果】

歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる各種高分子からなる材料である。

【使用方法等】

1. シリンジのキャップを外し、アプリケーションチップを装着する。

2. 歯牙模型を清拭し、シリンジのプランジャーを静かに押し、歯冠部等目的とする箇所に応用チップより少量ずつペーストを押し出し築盛し、光照射器により重合させる。必要であれば、同操作を反復する。
3. 終了後はアプリケーションチップを外し、キャップを装着し直射日光を避けて保管する。

【使用上の注意】

アクリル系モノマーに過敏症の人は手袋を着用してください。

【保管方法及び有効期間等】

- *・保管温度：12 ～ 26℃
- *・直射日光を避け保管する。
- *・使用期限：本体及びラベルに表示。
- *・小児の手の届かぬ場所に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社

住 所：神奈川県川崎市幸区北加瀬2-5-12

電 話 番 号：044-201-6171

**、*製造業者：Zirkonzahn srl

製 造 国 名：イタリア