

歯科材料 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 JMDN：34811000

フレーム A+B

*【形状・構造及び原理等】

フレーム A は白色の液状、フレーム B は黄色の液状のレジン物質です。それぞれを同量ずつ混ぜあわせると重合して硬化します。



【原材料】

フレーム A：ポリエーテル及び多価アルコール

フレーム B：ジフェニールメタン-4,4'-ジイソシアネート

【販売単位】

- ・フレーム A（250g）、フレーム B（250g）の各 1 缶入り
- ・フレーム B

*【使用目的又は効果】

歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる。

本品は、ジルコグラフ 025 エコの使用に際して、なぞり模型用のレジン冠を固定するためのフレームを作成する時に用いる。

*【使用方法等】

初めて使用するときは、缶から全量をプラスチック製の専用容器に入れ替えて使用する。

入れ替えるときは 良くかき混ぜて均一にしてから容器に入れる。

1. 型（フォーマー）に分離材を塗布する。
2. フレーム A 及びフレーム B の瓶をそれぞれ良く振って攪拌して均一にしてから、各々同量を容器（紙コップ等）に取り、よく練和混合する。
3. 気泡が入らないよう静かに型に流し入れる。
4. 1 時間後、完全に固まったのを確認してから型からはずす。

5. 充分硬化して安定してから使用する。

【使用上の注意】

- *1. 本品は歯科技術者のみが扱ってください。
- *2. 火気を避けて使用、保管してください。
- *3. 水、湿気を避けて取扱ってください。
- *4. B 液は固化しやすいので、開缶後はなるべく速やかに使い切ってください。
- *5. 眼につけてしまった場合は直ちに清水で洗い、眼科医の診察を受けること。

*【保管方法及び有効期間等】

直射光を避け室温で保管してください。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社

*住所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2 - 5 - 12

*電話：044 - 201 - 6171

**製造業者：Zirkonzahn srl

製造国名：イタリア