

**2018年10月改訂（第5版）

医療機器届出番号：14B1X90003ZZ0008

*2015年8月3日改訂（第4版）

歯科材料 09 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDN：70901000

エラボレーションストーン

*【形状・構造及び原理等】

アルミナ(Al_2O_3)を成型焼成したディスク、ホイール及びポイントの形態を持つ研削器材。



【原材料】

研磨材：アルミナ

軸部：高速度鋼（HSS）

【販売単位】

（単品）

ZZ301 及び ZZ302：各 2 本入り/箱

ZZ303 及び ZZ304：各 3 本入り/箱

ZZ305：6 本入り/箱

（セット）

ZZ306：ZZ301、ZZ302、ZZ303、ZZ304、ZZ305

各々1本のセット 5本入り/箱

*【使用目的又は効果】

焼結したジルコニアの補綴物の研削に使用する。

*【使用方法等】

1. 目的とする形状のエラボレーションストーンを選択し、歯科技工用ハンドピースのチャックに本品の軸部を十分に挿入固定する。
2. 試し回転をして、ガタ、振れ等のないことを確認後、研削部を補綴物等に静かに接触し、削りすぎに注意しながら、補綴物を研削する。

3. 必要に応じ研磨ペースト等を併用し、また、本品の種類を変えながら、補綴物を研削又は研磨する。

【使用上の注意】

1. 指定許容最高回転速度
φ10mm 以上 * 20,000 rpm
φ10mm 以下 * 30,000 rpm
2. 変形、損傷等のあるものは使用しないこと。
3. 眼の損傷を防ぐためゴーグルを使用すること。
4. 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- *5. 本品は記載する使用目的以外には使用しないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 水分、腐蝕性薬剤を避け、室温保管
2. 磨耗したときは新品と交換すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社

*住 所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2 - 5 - 12

*電 話：044 - 201 - 6171

**製造業者：Zirkonzahn srl

製造国名：イタリア