

**2018 年 10 月改訂（第 5 版）

医療機器届出番号：14B1X90003ZZ0009

*2015 年 8 月 3 日改訂（第 4 版）

歯科材料 09 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN：70903000

ダイヤモンド ラバーホイール

*【形状・構造及び原理】

マンドレルの先端に、ダイヤモンド粒子を含む
ゴム製のホイール状研磨器材を取り付けたもの
であり、歯科技工用ハンドピースに装着し、回
転力により補綴物等の表面を平滑に仕上げる。



ホイール φ：16mm

厚さ：1.3mm

シャンク φ：2.35mm

長さ：22.2mm

【原材料又は構成部品】

シャンク（柄）：高速度鋼

ホイール基材：合成ゴム

ダイヤモンド粒子

ホイールとシャンクはネジにより固定。

【販売単位】

3 本入り / 箱

*【使用目的又は効果】

*補綴物等の研磨に用いる。

*【使用方法等】

歯科技工用ハンドピースのチャックにシャンク
を確実に挿入固定し、予備回転をし、振れ等の
異常のないことを確認後、ホイールを補綴物等
に静かに接触し、許容最高回転速度 *20,000

rpm を超えぬ範囲に回転速度を調節しながら、
必要に応じ研磨ペースト等を併用して、補綴物
を平滑に仕上げる。

【使用上の注意】

1. 「指定許容最高回転速度」*10,000 rpm
2. 変形、損傷等のあるものは使用しないこと。
3. 本品は右回転で使用する。
- *4. 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- *5. 本品は記載する使用目的以外には使用しないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 水分、腐蝕性薬剤を避け、室温保管。
2. 甚だしく磨耗したものは新品と交換すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社

*住 所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2 - 5 - 12

*電 話：044 - 201 - 6171

**製 造 業 者：Zirkonzahn srl

製 造 国 名：イタリア