

**2018 年 10 月改訂（第 5 版）

医療機器届出番号：14B1X90003ZZ0022

*2015 年 8 月 3 日改訂（第 4 版）

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN：70903000

ジルコニアポリッシャー

*【形状・構造及び原理等】



フレーム型



ホイール型



ディスク型



レンズ型

本品は上記の 4 形態があり、それぞれにブルー（荒）、
ピンク（中）、グレイ（細）の 3 種の砥面を有する。

（単位：mm）

形状		製品 番号	表面 粗さ	作業部	
				直径	高さ
フレ ーム 型	ブルー	ZZ411	荒	3.3	7.0
	ピンク	ZZ421	中	3.3	7.0
	グレイ	ZZ431	細	3.3	7.0
ホイ ール 型	ブルー	ZZ412	荒	11.5	2.0
	ピンク	ZZ422	中	11.5	2.0
	グレイ	ZZ432	細	11.5	2.0
ディ スク 型	ブルー	ZZ413	荒	22.0	3.5
	ピンク	ZZ423	中	22.0	3.5
	グレイ	ZZ433	細	22.0	3.5
レン ズ型	ブルー	ZZ414	荒	22.0	3.0
	ピンク	ZZ424	中	22.0	3.0
	グレイ	ZZ434	細	22.0	3.0

*【販売単位】

1) 単品

- ① フレーム型 3 本入
- ② ホイール型 2 本入
- ③ ディスク型 1 個入
- ④ レンズ型 1 個入

2) セット

- ① スモールセット（ZZ451）

*フレーム型とホイール型 各 3 種類（計 6 本）

- ② ディスクセット（ZZ461）

*ディスク型 3 種類（計 3 本）

- ③ レンズセット（ZZ471）

*レンズ型 3 種類（計 3 本）

3) 付属品

マンドレル（ZZ441） 5 本入

*【使用目的又は効果】

ゴム基材で結合されたダイヤモンド微粒子からなる
歯科技工用研磨材である。

*【使用方法等】

適応する形態の本品を選び、歯科技工用ハンドピース
に正しく装着し、通常は荒砥、中砥、仕上げ砥の順で対
象物の研磨を行う。

【使用上の注意】

- 1. 軸部を確実にチャック奥まで挿入すること。
- 2. 砥石面への 2 次加工は行わないこと。
- 3. 無理な角度や過度の加圧は避けること。
- *4. 作業時は防塵マスク、ゴーグルを使用すること。
- 5. 使用前にテスト回転を行い、振れ、滑りのないこ
とを確認すること。

*【保管方法及び有効期間等】

水分、腐食性薬品を避けて汚染を受けない状態
で保管管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社

*住 所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2 - 5 - 12

*電 話 番 号：044 - 201 - 6171

**製 造 業 者：Zirkonzahn srl

製 造 国 名：イタリア