


**2026 年 1 月改訂（第 6 版）
*2018 年 10 月改訂（第 5 版）

医療機器届出番号：14B1X90003ZZ0022

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN：70903000

ジルコニアポリッシャー

**【形状・構造及び原理等】

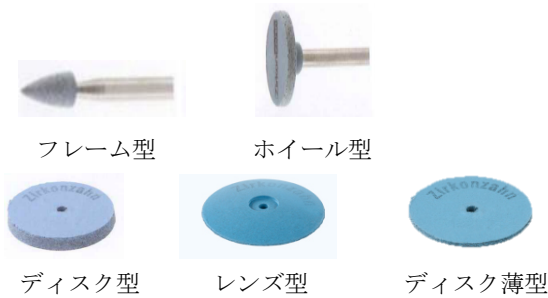

本品は上記の 5 形態があり、それぞれにブルー（荒）、
ピンク（中）、グレー（仕上げ）の 3 種の砥面を有す
る。

製品の種類

単位：mm					
形状	製品番号	表面粗さ	作業部径	作業部長さ	
フレーム型	ブルー	ZZ411	荒	3.3	7.0
	ピンク	ZZ421	中	3.3	7.0
	グレー	ZZ431	仕上げ	3.3	7.0
ホイール型	ブルー	ZZ412	荒	11.5	2.0
	ピンク	ZZ422	中	11.5	2.0
	グレー	ZZ432	仕上げ	11.5	2.0
ディスク型	ブルー	ZZ413	荒	22.0	〈厚さ〉3.5
	ピンク	ZZ423	中	22.0	〈厚さ〉3.5
	グレー	ZZ433	仕上げ	22.0	〈厚さ〉3.5
レンズ型	ブルー	ZZ414	荒	22.0	〈厚さ〉3.0
	ピンク	ZZ424	中	22.0	〈厚さ〉3.0
	グレー	ZZ434	仕上げ	22.0	〈厚さ〉3.0
ディスク薄型	ブルー	ZZ415	荒	20.0	〈厚さ〉1.0
	ピンク	ZZ425	中	20.0	〈厚さ〉1.0
	グレー	ZZ435	仕上げ	20.0	〈厚さ〉1.0

3) 付属品

マンドレル（ZZ441） 5 本入

**【使用目的又は効果】

ゴム基材で結合されたダイヤモンド微粒子からなる
歯科用研磨材で、歯科技工物の研磨に用いる。

**【使用方法等】

適応する形態の本品を選び、歯科技工用ハンドピース
に正しく装着し、通常は荒砥、中砥、仕上げの順で対
象物の研磨を行う。

【使用上の注意】

1. 軸部を確実にチャック奥まで挿入すること。
2. 砥石面への 2 次加工は行わないこと。
3. 無理な角度や過度の加圧は避けること。
4. 作業時は防塵マスク、ゴーグルを使用すること。
5. 使用前にテスト回転を行い、振れ、滑りのないこ
とを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

水分、腐食性薬品を避けて汚染を受けない状態で保管
管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社
住 所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2 - 5 - 12
電 話 番 号：044 - 201 - 6171
製 造 業 者：Zirkonzahn srl
製 造 国 名：イタリア