

**2018年10月改訂（第5版）

医療機器届出番号：14B1X90003ZZ0024

*2015年8月3日改訂（第4版）

歯科材料 09 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具 JMDN：70744000

ミリングバー2.4E

*【形状・構造及び原理等】

タングステンカーバイド製の作業部と軸部をもっています。



*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社

*住所：神奈川県川崎市幸区北加瀬2-5-12

*電話番号：044-201-6171

**製造業者：Zirkonzahn srl

製造国名：イタリア

*【使用目的又は効果】

陶材、又は同種の材料の研削に使用します。

*【使用方法等】

*本品を歯科技工用電動ハンドピースに正しく装着し通法により使用してください。

【使用上の注意】

1. 軸部を確実にチャックの奥まで挿入してください。
2. 使用前に予備回転を行い、振れが無いことを確認してください。
3. 無理な角度や過度の加圧は避けてください。
4. *本品を使用する際は必ず吸塵装置を使用してください。
5. *本品を使用する際は粉塵の影響を避けるため必ず防塵メガネとマスクを使用してください。
- *6. 本品を他の目的に使用しないでください。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 水分、腐食性薬材を避けて汚染を受けない状態で保管してください。
2. 歯科の従事者以外が触れないように保管・管理してください。
3. 本製品に明らかな疲労、磨耗等が見られた場合、また、切削能力が落ちたと感じた場合は新しい製品と交換してください。

*【保守・点検に係る事項】

使用前後にワイヤーブラシ等を用いて清掃してください。