

**2021年4月改訂（第9版）

医療機器届出番号：14B1X90003ZZ0029

*2020年1月15日改訂（第8版）

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具 JMDN：70744000

CAD/CAM ミリングバー

**、* 【形状・構造及び原理等】

CAD/CAM システム用の切削器具であり保持部（軸部）及び作業部からなる。



製品の種類（例）

| No. | 品名及び種類 | 作業部φ (mm) | 保持部φ (mm) | 全長 (mm) | 品目 番号 |
|-----|-------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 1 | CAD/CAM ミリングバー 2L | 2.0 | 3 | 57 | FR035 |

【使用目的又は効果】

歯科用 CAD/CAM 装置に装着し、陶材、レジン、ワックス、シンターメタル、チタン、コバルト・クロム又は同種の材料等の切削に用いる。

【使用方法等】

CAD/CAM システムの[CAM]装置のパーホルダーに装着し、切削作業を[CAD]装置の自動制御により行う。

【使用上の注意】

1. 歯科医療有資格者以外は使用しないでください。
2. 切削時の粉塵の影響を避けるため、ゴーグルとマスクを使用してください。
3. 本品は Zirkonzahn 社製 CAD/CAM システム用として製造販売しております。他社製品には使用しないでください。
4. 記載の使用目的以外には使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 水分、腐食性薬材を避けて汚染を受けない状態で保管してください。
2. 歯科の従事者以外が触れないように保管・管理してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前後にワイヤーブラシ等を用いて清掃し、本品表面の状況を点検してください。
2. キズや摩耗を認めた場合は新品と交換してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社
住 所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2 - 5 - 12
電 話 番 号：044 - 201 - 6171
製 造 業 者：Zirkonzahn srl
製 造 国 名：イタリア