

**2022年5月改訂(第5版)
*2018年12月改訂(第4版)

医療機器届出番号: 14B1X90003ZZ0031


歯科材料 08 歯科用石膏及び石膏製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 JMDN: 34811000

トライ - イン

***【形状、構造及び原理等】

【形状】

本品は CAD/CAM システムを利用して、最終補綴物作製前の試適用模型作製に用いる樹脂材料である。CAM 装置の研削物保持部に合わせた円盤状で、形状及び寸法は以下のとおり。

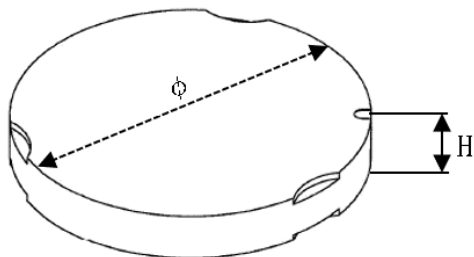

・製品の種類(例)

(単位: mm)

No.	製品番号	製品名	色調	直径(φ)	高さ(H)
1	TRAA0116	トライ - イン I 95H16	ホワイト	95	16

【原材料】

- トライ - イン I
主原材料: PMMA(ポリメチルメタクリレート)
CAS No. 9011-14-7
- トライ - イン II
主原材料: PMMA(ポリメチルメタクリレート)
CAS No. 9011-14-7
- トライ - イン III
原材料: ポリウレタン
CAS No. 9009-54-5

【使用目的又は効果】

本品は最終補綴物作製前の試適用模型を CAD/CAM 装置により作成するものである。本品で試適用模型を作製することで最終補綴物作製前に調整することができる。

【使用方法等】

予め CAD 装置で設計した試適用模型に対応する本品を CAM 装置の研削物保持部に固定する。PMMA 用研削バーをハンドピースに装着し、CAM 装置を始動する。研削バーは荒削り用から順次精密削り用バーに交換し仕上げる。

【使用上の注意】

切削に使用するバーは PMMA 専用のバーを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

室温で乾燥した場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: トーシンデンタル株式会社
住 所: 神奈川県川崎市幸区北加瀬 2 - 5 - 12
電 話 番 号: 044 - 201 - 6171
製 造 業 者: Zirkonzahn srl
製 造 国 名: イタリア