

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用ダイヤモンドバー JMDN：16670000

## CAD/CAM ダイヤモンドバー

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、CAD/CAM システム用の研削器具であり、保持部（軸部）及び作業部からなる。作業部はスチール製の軸に微細なダイヤモンド結晶を砥着（電着）させたものであり、本品を回転させることにより材料を研削する。

\*\* 本品には、以下の9種類の製品がある。

\*製造業者：Zirkonzahn srl

製造国名：イタリア



\*\*製品の種類 (例)

No.	製品番号	品名及び種類	作業部直径 (mm)	保持部直径 (mm)	全長 (mm)
1	ZBAC2025	CAD/CAM ダイヤモンドバー 2.5 Cer	2.5	3	50

### 【使用目的又は効果】

歯科用 CAD/CAM 装置に装着し、プラスチック、陶材等の材料を研削する。

### 【使用方法等】

CAD/CAM システムの[CAM]装置のバーホルダーに装着し、切削作業を[CAD]装置の自動制御により行う。

### 【使用上の注意】

1. 本品は注水下で使用して下さい。
2. 切削時の粉塵の影響を避けるため、防護メガネとマスクを使用して下さい。
3. 本品は Zirkonzahn 社製 CAD/CAM システム用として製造販売しております。他社製品には使用しないでください。
4. 変形、損傷のあるものは使用しないこと。
5. 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 水分、腐食性薬剤を避けて汚染を受けない状態で保管してください。
2. 歯科の従事者以外が触れないように保管・管理してください。
3. 磨耗したときは新品と交換してください。

### 【保守・点検に係る事項】

使用前後にワイヤーブラシ等を用いて清掃し、本品表面のキズや摩耗の状況を点検してください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社  
住 所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2 - 5 - 12  
電 話 番 号：044 - 201 - 6171