

機械器具 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用ポーセレン焼成炉 JMDN:35762000

ジルコンオーブントーボ

【禁忌・禁止】

- 1.本品は歯科技工技術に精通した技術者が操作すること。
- 2.高温の材料を扱う際は常に火傷の危険があることに注意して保護手袋を着用すること。

【形状・構造及び原理等】

【形状】



寸法: 39(幅)×69(高さ)×49(奥行)cm 重量: 65 kg
外殻は強化ガラス製の箱型の機器である。

* 【原理】

歯科技工で切削作製したポーセレン材を高温で焼成するための高温焼結炉であり、乾燥、予熱の機能も備えている。

電 源	AC200-260V : 50Hz/60Hz
出 力	3000w
燃焼室容積	0.9ℓ
最高温度	1700℃
重 量	65 kg

【使用目的又は効果】

ポーセレンを焼成するために歯科技工で使われる炉である。

【使用方法等】

- 1) 焼成炉の台座に焼成する製作物を並べる。
- 2) メインスイッチを「ON」にする。
- 3) 希望のプログラムを選択する。
- 4) スタートボタンを押して焼成を開始する。
- 5) 焼成中は本体の外側も高温になるので、触れたりしないよう注意すること。
- 6) 焼成終了後、焼成炉の台座が自動降下するまで製作物には触れないこと。
- 7) 製作物が室温付近まで冷えてから、保護手袋を着用して製作物を取り出す。

【使用上の注意】

- ・取扱説明書を必ず参照すること。
- ・本品は付近に可燃物のない堅固な台上に安定した状態で設置すること。
- ・高温の材料を取扱う際は保護手袋を着用すること。
- ・上方へ熱い空気がでるため、焼成炉の上部 1.5m 以内に物を置かないこと。
- ・本体の周りは 十分な放熱が確保されるように空間を設け、何も物を置かないこと。
- ・製作物を取り出す前には 必ず温度表示を確認して室温近くまで冷えてから製作物を取り出すこと。
- ・電気機器のため、絶対に本体に水がかかたりしないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・保管場所は上記【使用上の注意】に則った場所であること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の名称又は名称等】

製造販売業者: トーシデンタル株式会社
住 所 : 神奈川県川崎市幸区北加瀬 2-5-12
電 話 番 号 : 044 - 201 - 6171
F A X 番 号 : 044 - 200 - 4088
製 造 業 者 : Zirkonzahn srl
製 造 国 名 : イタリア

取扱説明書を必ずご参照ください