

機械器具 60 歯科用エンジン

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット JMDN:34713000

P4000プリンター

【禁忌・禁止】

- 1.本品は歯科技工技術に精通した技術者が操作すること。
- 2.機械の改造及び分解は行わないこと。
- 3.不具合、故障状態では使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】



[形状・構造]

寸法：330(幅)×470(高さ)×290(奥行)mm
重量：17.2 kg

[原理]

液状の光硬化性樹脂を光によって一層ずつ硬化させて、それを積層することによって造形する。

動作電圧	AC100-240V：50Hz/60Hz
消費電力	200w
造形エリア	幅 200 mm×高さ 200 mm ×奥行 125 mm
XY 解像度	52 μm
最小積層厚	10 μm
インターフェイス	Wi-Fi USB ポート タッチパネル
使用環境	20～30℃で換気ができる環境

【使用目的又は効果】

本品は、複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計(CAD)又はコンピュータ支援製造(CAM)に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本機が水平な場所に置かれ電源等が適切な状態になっているか確認する。
- 2) 本機、コンピュータの電源を入れる。
- 3) サポート付与したデータを読み込む。
- 4) スライスソフトウェアの表示に従い、適量のレジンレジンをレジンパッドに注入する。
- 5) 印刷ファイルを選択し、印刷処理を開始する。
- 6) 印刷物をレジンプレートから取り出す。
- 7) 印刷物のポストキュア処理を行う。

【使用上の注意】

- ・取扱説明書を必ず参照すること。
- ・本品は堅固な台上で安定した状態で設置すること。
- ・十分な室内照明（500 ルクス以上）を設置してください。
- ・電気機器のため、絶対に本体に水がかかったりしないように注意すること。
- ・緊急時に簡単にプラグを抜いたり、点検したりできるようにすること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、多湿を避けた室内に設置してください。
- ・本品は従事者以外が触れないように適切に保管・管理してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社
住 所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2-5-12
電 話 番 号：044 - 201 - 6171
F A X 番号：044 - 200 - 4088
製 造 業 者：Zirkonzahn srl
製 造 国 名：イタリア

取扱説明書を必ずご参照ください