


機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器  
一般医療機器 歯科技工用重合装置 JMDN:35761000

## L300 ポストキュアリングランプ

### 【形状・構造及び原理等】

#### 【形状・構造】

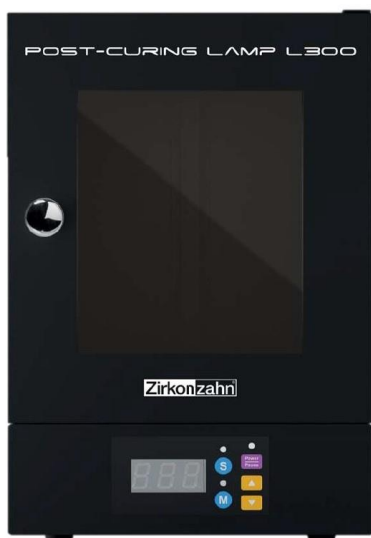

寸法：195(幅)×285(高さ)×215(奥行)mm

重量：4.2 kg

外殻はアルミ、プラスチック製の箱型の機器である。

#### 【原理】

歯科用の光硬化性樹脂を紫外線によって重合させる。

|      |                      |
|------|----------------------|
| 動作電圧 | AC100-240V：50Hz/60Hz |
| 消費電力 | 200W                 |

### 【使用目的又は効果】

本品は歯科用の光硬化性樹脂に UV-LED で紫外線光を照射し、重合させるために使われる歯科技工用重合装置である。

### 【使用方法等】

- 1) 重合する歯科用の光硬化性樹脂を超音波洗浄器などできれいに洗浄し十分に乾燥させる。
- 2) 本機の操作パネルの電源スイッチを押し、電源を「ON」にする

- 3) 本機前面扉を開き、歯科用の光硬化性樹脂を台座プレートの上にセットする。
- 4) 扉を閉め、硬化時間を設定し、電源スイッチを押して硬化を開始する。
- 5) 処理が終わったら扉を開け、硬化した歯科用の光硬化性樹脂を取り出す。
- 6) 電源スイッチを長押しし、電源を「OFF」にする。

### 【使用上の注意】

- ・取扱説明書を必ず参照すること。
- ・本品は堅固な台上で安定した状態で設置すること。
- ・十分な室内照明（500ルクス以上）を設置してください。
- ・電気機器のため、絶対に本体に水がかかったりしないように注意すること。
- ・本機を洗浄する際は主電源からプラグを抜いてください。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、多湿を避けた室内に設置してください。
- ・本品は従事者以外が触れないように適切に保管・管理してください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社

住 所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2-5-12

電 話 番 号：044 - 201 - 6171

F A X 番号：044 - 200 - 4088

製 造 業 者：Zirkonzahn srl

製 造 国 名：イタリア

取扱説明書を必ずご参照ください