

機械器具 60 歯科用エンジン

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット JMDN：34713000

ミリングユニットM6 テレスコーパー**

***【形状・構造及び原理等】

〔形状構造〕

ミリングユニット M6



テレスコーパーブランクチェンジャー16 ブランクマガジン

寸法：1230×690×700mm（幅×高さ×奥行き）

重量：220kg

テレスコーパーブランクチェンジャー80 ブランクマガジン

寸法：1620×690×750mm（幅×高さ×奥行き）

重量：280kg

※ディスク収納枚数は、ストレージ(60/70/80)の組み合わせによって変動する。

共に外殻は強化ガラス、ステンレススチール及びプラスチック製で箱型の機器である。

〔原理〕

設計された歯科修復物をコンピュータ支援により切削製造する。

【使用目的又は効果】

本品は複合ソフトウェアを利用し、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援製造（CAM）を行う装置である。

【使用方法等】

1. 専用の CAM ソフトにて切削する歯科修復物を材料に配置し加工パスを作成する。
2. 本機の電源を「ON」にし、材料と加工ツールをセットする。
3. 本機タッチパネルを操作し作成された加工パスをインポートして切削加工を開始する。
4. 切削加工が完了したら材料を取り外す。
5. 使用後は切削粉などを清掃し、電源を「OFF」にする。

【使用上の注意】

1. 取扱説明書等の記載内容以外の分解、改造は行わないこと。
2. 本機の清拭は硬く絞った布を用い、余分な水分を避けること。
3. 本機の操作は機器の講習を受けた人が行うこと。
4. 本来の目的以外に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿を避けた室内に設置してください。
本品は従事者以外が触れないように適切に保管・管理してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社
住 所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2 - 5 - 12
電 話 番 号：044 - 201 - 6171
製 造 業 者：Zirkonzahn srl
製 造 国 名：イタリア

取扱説明書を必ずご参照ください