

機械器具 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用ポーセレン焼成炉 JMDN:35762000

ジルコンオープン 600V4

【禁忌・禁止】

- 本品は歯科技工技術に精通した技術者が操作すること。
- 高温の材料を扱う際は常に火傷の危険があることに注意して保護手袋を着用すること。

【形状・構造及び原理等】

[形状]



寸法：39(幅)×69(高さ)×49(奥行)cm 重量：75 kg
外殻は強化ガラス製の箱型の機器である。

[原理]

歯科技工で切削作製したポーセレン材を高温で焼成する。

電源	AC100-240V : 50Hz/60Hz
出力	1500W
焼成室容量	0.6L
焼成室寸法	60×100×100mm (W×H×D)
最高温度	1700℃

【使用目的又は効果】

本品は歯科技工で切削作製したポーセレン材を高温で焼成することを目的とした高温焼成炉である。

【使用方法等】

- オン/オフスイッチを押し本機の電源を「ON」にする。
- 焼成室内が汚れている場合は清掃する。
- 修復物を焼成室の中央に置き炉のドアを閉める。
- 焼成プログラムを選択し、焼成を開始する。
- 焼成プログラムが終了したら炉のドアを開ける。
- 焼成室が室温まで冷めてから修復物を取り出し、本機の電源を「OFF」にする。

【使用上の注意】

- 取扱説明書を必ず参照すること。
- 本品は付近に可燃物のない堅固な台の上に安定した状態で設置すること。
- 高温の材料を取扱う際は保護手袋を着用すること。
- 上方へ熱い空気がでるため、焼成炉の上部 1.5m 以内に物を置かないこと。
- 本体の周りは十分な放熱が確保されるように空間を設け、何も物を置かないこと。
- 作製物を取り出す前には必ず温度表示を確認して室温近くまで冷えてから作製物を取り出すこと。
- 電気機器のため、絶対に本体に水がかかたりしないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 清潔で高温、多湿を避けた室内に設置してください。
- 海拔 2000m以下で使用してください。
- エアコンの近くに設置しないこと。冷風を避けること。
- 本品は従事者以外が触れないように適切に保管・管理してください。

【製造販売業者及び製造業者の名称又は名称等】

製造販売業者：トーシデンタル株式会社
住所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2-5-12
電話番号：044-201-6171
FAX 番号：044-200-4088
製造業者：Zirkonzahn srl
製造国名：イタリア

取扱説明書を必ずご参照ください