

歯科材料 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材(34811000)

プリンターレジンプレシジョンモデル

【禁忌・禁止】

本品及び本品に使用している成分に対し、発疹、皮膚炎等の既往歴のある者は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】



ZBAC7301WHI

製品の種類

No.	製品番号	品種
1	ZBAC7301WHI	ホワイト (1000 g)
2	ZBAC7401GRY	グレー (1000 g)
3	ZBAC7501IVO	アイボリー (1000 g)
4	ZBAC7601LGR	ライトグレー(1000 g)

【形状・構造】

性 状：液状

成 分：モノマー、光重合触媒、その他

【原理】

UV-LED 照射により重合硬化し、三次元的に造形される。

【使用目的又は効果】

歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品の容器を約 30 秒間静かに振って適量をレジンバットに注入する。
- 3) 印刷物を洗浄する。
- 4) 二次硬化ランプを用いて印刷物のポストキュア処理を行う。
- 5) サポート部分を取り除き、必要に応じて形態修正等を行う。

【使用上の注意】

- 1) 使用方法等に関連する使用上の注意
 1. 適切な換気がなされている環境で使用する。
 2. 本材を樹脂トレイに注入した状態で保管すると、沈降物の発生や成分分離のおそれがあります。造形前には必ずプラスチック製ヘラで均一になるようにかき混ぜること。

2) 重要な基本的注意

1. 本材の使用により発疹・皮膚炎等の過敏症状が現れた作業者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
2. 本材を使用する際には、必ずゴム手袋及び保護眼鏡等を着用し、目や皮膚、衣類に付着しないような措置を講じること。
皮膚や衣類に付着した場合は、汚染された衣類を直ちに脱ぐこと。
必要であれば皮膚を多量の水と石鹸で洗うこと（接触する可能性のある部分のみ）。
必要に応じてコンタクトレンズを外し、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
3. 本材を使用した造形物の形態修正、仕上げ及び研磨を行う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所集塵装置や公的機関が認定した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないように注意すること。

3) 廃棄物の処理方法

家庭ごみと一緒に廃棄しないこと。廃棄は地域、公的規則に従って行う。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

本材はもとの容器のまま常温で直射日光や紫外線を避け、食品、飲料、動物飼料から離れた、十分に換気された常温の場所で容器を密閉して保管すること。酸、塩基、酸化性物質、発火性物質と一緒に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社

住 所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2-5-12

電 話 番 号：044 - 201 - 6171

FAX 番号：044 - 200 - 4088

製 造 業 者：Zirkonzahn srl

製 造 国 名：イタリア