

プリントアナログ

【形状・構造及び原理等】

〔形状、構造〕

外観例



プリントアナログ、スクリュ キャリブレーションピン

〔原材料〕

チタン、ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造等を作製するために、歯科用模型等に装着して使用する歯科用インプラントフィクスチャのレプリカである。

【使用方法等】

1. 本品を模型に挿入する前に、下からスクリューを差し込み、専用のドライバー※を用いて、ゆるく(反時計回りに 2 回転ほど)固定します。このとき、深く締めすぎないように、ステップが見える状態を維持してください。
2. 本品を模型に挿入します。その際、回転防止のため、本品の平らな面が模型側の凹みと合うようにしてください。
3. 本品の面取りの下端が、模型の開口部の縁と一致していることを確認し、上からスクリューを締め、固定します。

※ドライバーは、「Micro TX」（販売名：技工用スクリュードライバー、届出番号：14B1X90003ZZ0078）を、アダプターは、（販売名：スクリュードライバー、届出番号：14B1X90003ZZ0054）使用すること。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

1. キャリブレーション用データとキャリブレーションピンを用いて、模型作製前にアナログと模型のクリアランスを確認すること。
2. 併用する医療機器がある場合には、併用する医療機器の添付文書を必ず合わせて参照すること。

【使用上の注意】

1. 口腔内では使用しないこと。
2. 本器に変形、破損等が認められる場合には、使用を中止すること。
3. 本器の加工、改造は行わないこと。
4. 歯科医療従事者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。
2. 品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社

住 所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2 - 5 - 12

電 話 番 号：044 - 201 - 6171

製 造 業 者：Zirkonzahn srl

製 造 国 名：イタリア