

## タングステンカーバイドバー

## 【形状・構造及び原理等】

[形状、構造]

外観例



## 【原材料】

作業部/シャンク：タングステンカーバイド合金

## 【使用目的又は効果】

歯科技工用ハンドピース等に装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するために用いる。

## 【使用方法等】

1. 歯科技工用ハンドピースに装着し、試運転して振れがないことを確認し、被切削物に押し付けて切削する。

最大回転数

| 製品番号  | 速度 (rpm) |
|-------|----------|
| ZZ001 | 40,000   |
| ZZ002 | 50,000   |
| ZZ003 | 40,000   |
| ZZ004 | 40,000   |

## 【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 歯科技工用ハンドピースの取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
2. 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。また摩耗したときは新品と交換すること。
3. 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
4. 折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度な加圧での使用は避けること。
5. 安全の為に、保護メガネ等を装着すること。また、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置や防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。
6. 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
7. 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

## 【使用上の注意】

1. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
2. 本製品により研削した粉塵、破片が目に入らないように注意すること。万一目に入った時には、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

## 【保管方法及び有効期間等】

1. 水分、粉塵、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように、清潔な場所に保管すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーンデンタル株式会社

住 所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2 - 5 - 12

電 話 番 号：044 - 201 - 6171

製 造 業 者：Zirkonzahn srl

製 造 国 名：イタリア