

2026 年 3 月作成（第 1 版）

医療機器届出番号：14B1X90003ZZ0078

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 JMDN：70757000

技工用スクリュードライバー

【形状・構造及び原理等】

〔形状、構造〕

外觀例



〔原材料〕

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

1. スクリューに対応する適当なドライバーを選択します。
2. アダプターラチェットレンチ※を装着し、手で回転させ、スクリューを締結します。

※「アダプターラチェットレンチ」（販売名：スクリュードライバー、届出番号：14B1X90003ZZ0054）

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

1. 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。器具の強度を上回る過大な側方圧やねじり応力が加わった場合、器具が変形したり破折したりする恐れがある。
2. 併用する医療機器がある場合には、併用する医療機器の添付文書を必ず合わせて参照すること。

【使用上の注意】

1. 口腔内では使用しないこと。
2. 本器に変形、破損等が認められる場合には、使用を中止すること。
3. 本品に対し、加工、改造は行わないこと。
4. 歯科医療従事者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トーシンデンタル株式会社
住 所：神奈川県川崎市幸区北加瀬 2 - 5 - 12
電 話 番 号：044 - 201 - 6171
製 造 業 者：Zirkonzahn srl
製 造 国 名：イタリア