

アモレFS1

【警告】


- ・吸引を行う際は収集ビン（容量）を超えないようにすること。〔吸引物の本体への流入の恐れがあるため〕
- ・振動や衝撃（運搬時を含む）を与えないこと。
- ・火気および熱源周辺での使用は避けること。
- ・不安定な場所での使用や無理な体勢での使用はしないこと。

【禁忌・禁止】

- ・採血用には使用しないこと。
- ・併用した吸引カテーテルは再使用しないこと。〔単回使用のため〕

【形状・構造及び原理等】

** 1. 形状・構造及び各部の名称

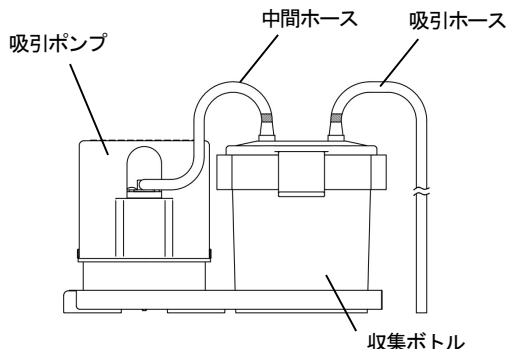

2. 原理

吸引ポンプを足で踏むことにより内部のピストンが下がり吸引圧が発生する。足を離すと内部のばねがピストンを押し上げ排気する。この繰り返しにより吸引を行う。

** 3. 寸法および質量

寸法	縦 160mm × 横 280mm × 奥行 150mm
質量	約 1kg

【使用目的又は効果】

本品は電源を必要とせず、足で吸引ポンプを稼働させることにより吸引圧を発生させ、口咽頭での喀痰等の吸引に使用できる。小型軽量のため、緊急時や屋外用として携帯が可能である。

【使用方法等】

詳細については、取扱説明書を参照してください。

1. 吸引ポンプや収集ボトルなど全ての部品を取出し、上記の構造図のとおり各部品を接続し、吸引ホースに吸引カテーテル（別売品）を接続します。
2. 安定した場所に吸引ポンプと収集ボトルを置き、ポンプを踏んでみて空気を吸引していることを確認してください。
3. 足で吸引ポンプを踏みながら吸引カテーテルを操作して吸引したい部位に挿入し吸引を開始してください。
(1) 吸引流量は吸引ポンプの踏み加減によって調節します。
(2) 収集ボトルが傾かないように注意してください。

4. 吸引が終了したら、吸引カテーテルを廃棄する。

（廃棄方法は各自治体に指示に従うこと。）

5. 吸引ポンプと中間チューブ、収集ボトル、吸引ホースを清掃し、新品の吸引カテーテルと一緒に保管してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・吸引ホースや中間チューブは、折り曲げたり過度に引っ張ったり、無理に押し込むような負荷がかからないようにすること。
〔破損、液漏れ等が生じる恐れがある。〕
- ・吸引ポンプで指等を挟まないように注意すること。
- ・各部の接続不良や締め付け不良による吸引物の漏れがないように注意すること。また、未清掃状態での使用・保管も避けること。
〔感染症等の汚染の恐れ、性能低下の恐れがある。〕

2. 併用機器

- ・吸引カテーテルは承認品を使用すること。

3. その他の注意

- ・操作中に過剰な吸引圧をかけたり、長時間の吸引はしないこと。
〔粘膜の損傷の恐れがある。〕
- ・操作中に異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・高温、多湿、直射日光及、水濡れを避けて下記条件にて保管すること。

2. 耐用年数

- ・6 年〔自己認証（当社データによる）〕

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・消毒

- ・吸引ポンプは表面の汚れ水拭き等により清掃してください。
- ・収集ボトルやホース類は洗浄後、取扱説明書を参照して消毒を行ってください。

2. 点検

- ・定期的に外観と動作確認をしてください。
- ・異常が認められる場合は、清掃・消毒等をした後に販売元に点検依頼をしてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：トクソー技研株式会社

住 所：〒879-0232 大分県宇佐市大根川 318 番地

電 話 番 号：0978-33-5595