

機械器具（32）医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用キャニスタ（34858000）

新ディスポバッグ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 新ディスポバッグと新ディスポバッグ専用ボトルは、同容量の製品を使用すること。[異なる容量の製品を使用すると新ディスポバッグが破裂することがあるため。]
3. 新ディスポバッグを新ディスポバッグ専用ボトルに挟まないよう十分注意して装着すること。[挟む事により、新ディスポバッグに傷・穴ができ、破裂の原因になることがあるため。]

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、容量の違いにより 1.5L 用と 2.5L 用がある。また、それぞれ凝固剤無しと凝固剤入りがあり、合計 4 種類である。

No.	構成品名	形状
1	新ディスポバッグ 1.5L（凝固剤無し）	
2	新ディスポバッグ 1.5L（凝固剤入り）	
3	新ディスポバッグ 2.5L（凝固剤無し）	
4	新ディスポバッグ 2.5L（凝固剤入り）	

No.	付属品名	形状
1	イエローコネクター	
2	オレンジコネクター	
3	吸引用変換コネクター	
4	バクテリアフィルター	
5	バクテリアフィルター メデラ型	
6	オーバーフロー・プロテクト付バクテリアフィルター	
7	オーバーフロー・プロテクト付バクテリアフィルター メデラ型	
8	オーバーフロー・プロテクト付バクテリア・消臭フィルター	
9	オーバーフロー・プロテクト付バクテリア・消臭フィルター メデラ型	
10	ディスポーザブル採集カップ	

No.	付属品名	形状
11	ウィルスフィルター メデラ型	
12	ウイルスフィルター	

【使用目的又は効果】

体液の回収のため吸引器とともに使用するキャニスタをいう。折り畳んだ状態で提供され、使用前に組み立てる。

【使用方法等】

この製品の仕様に合った吸引ボトル（販売名：新ディスポバッグ専用ボトル 届出番号：28B1X10009320005）と組み合わせること。それ以外の製品との組み合わせで使用した場合、機能を確保することができず、人体への傷害や機器の破損につながるおそれがある。


<一般的な使用方法>

注意：この製品を取り扱う際には、医療用手袋などを必ず着用すること。廃液に触れると、感染するおそれがある。

1. 本品専用の新ディスポバッグ専用ボトルを準備する。
2. 本品を下図のとおりボトルに挿入し、嵌め込む。

注意：バッグとボトルを取付ける際は蓋が確実に閉まっていることを確認すること。[蓋が閉まっていないと十分に吸引できない場合がある。]

3. トップ部分の接続口に吸引チューブ等を接続し使用する。

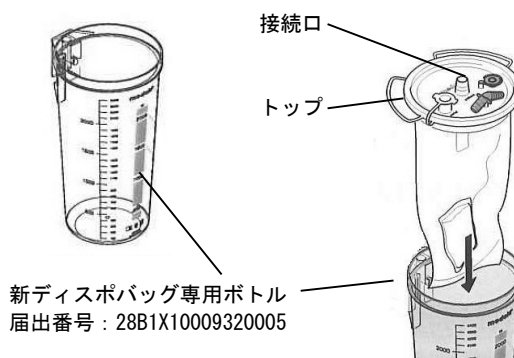

4. 廃液がボトルの目盛のMAXラインまで達したら、新しいバッグに取替える。

また、連結使用する際には、最後尾のボトルの目盛のMAXラインまで達したら、新しいバッグに取替える。

注意：バッグを取り外す際は、連結チューブと患者側チューブを抜き、蓋を閉めてから吸引を停止すること。その際には、連結ポート用キャップをカチッと音がするまで閉めること。

*【使用上の注意】

1. 使用前に本品に異常があった場合は使用しないこと。
2. 単回使用であるため再使用しないこと。
3. 廃液には直接触れないこと。感染のおそれがある。
4. この製品を取り扱う際には、医療用手袋などを必ず着用すること。触れてしまった場合は、各施設の手順に従って処置し、必要に応じて医師の診断を受けること。また、他の機器などにこれらが付着し

た場合はただちに拭き取ること。

5. 使用後は、廃棄物処理に関する規則に従って感染性廃棄物として廃棄すること。
6. 油分、アルコール類、下剤、消泡剤等の薬剤を多く含む廃液は、製品に封入されている凝固剤では完全にゲル化しないことがある。そのような場合、廃液バッグは施設のガイドラインに従って処理すること。
7. 1 バックに 2 症例分など時間をあけて吸引すると 2 症例目の体液はゲル化しない場合がある。
8. 連結して使用する際は、大量の液体を一度に吸引すると固まらない可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

高温多湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所及び水がかからない場所に保管。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 トータルメディカルサプライ
TEL：078-302-5595 FAX：078-302-5596

外国製造業者：メデラ エージー（スイス）
Medela AG