

機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ（16779000）

シリコンチューブ

**【禁忌・禁止】

1. 再使用可能な製品は滅菌方法に記載されている以外の方法で滅菌しないこと。
[本品が劣化するおそれがあるため。]
2. ディスポーザブル採集カップは再使用禁止。

**【形状・構造及び原理等】

<種類>


本品は、チューブの長さ、及び付属品の組み合わせ等により以下のような種類がある。

<形状>

組み合わせ例等


シリコンチューブ（1m）

- ・ 1m シリコンチューブ
- 片側に I コネクタ付き

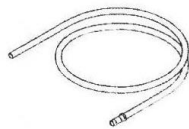

I バキュームライン

- ・ 30cm シリコンチューブ
- 片側に I コネクタ付き

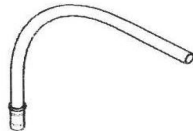


Y バキュームライン

- ・ 30cm シリコンチューブ
- 片側に Y コネクタ付き



チェンジバルブセット

- ・ チェンジバルブ
- ・ レールホルダー
- ・ 30cm シリコンチューブ×2
- 両端に I コネクタ付き

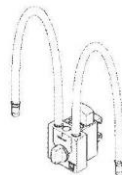

リユーザブル用吸引連結チューブ



ディスポーザブル採集カップ 10-14mm

ディスポーザブル採集カップ 6-10mm



**【使用目的又は効果】

吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブ等をいう。

【使用方法等】

<一般的な使用方法>

本品は、Medela 社製品と組み合わせて使用すること。

- ・ 吸引器と新ディスポバッグとの接続

1. 用途に適した本品を準備する。
2. 本品を吸引器と新ディスポバッグ間に接続する。

*【使用上の注意】

1. 使用前に本品に異常があった場合は使用しないこと。
2. 廃液には直接触れないこと。感染のおそれがある。
3. この製品を取り扱う際には、医療用手袋などを必ず着用すること。
触れてしまった場合は、各施設の手順に従って処置し、必要に応じて医師の診断を受けること。また、他の機器などにこれらが付着した場合はただちに拭き取ること。
4. チューブをコネクタに接続する際は、チューブ接続側に接続すること。
5. 本品を接続の際は、緩み等の異常がないかどうか確認すること。
6. 他社製品との併用に関しては検討を行っていないため、併用する際には各施設の責任において実施すること。

【保管方法及び有効期間等】

高温多湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所及び水がかからない場所に保管。

**【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に、損傷、汚れ等がないことを確認すること。
2. 再使用可能な製品は使用後、できるだけ洗浄・すすぎ等の汚染除去を行い、血液等異物が付着していないことを確認したのち、次に示す滅菌条件で滅菌を行い保管すること。

<滅菌方法>

滅菌方法：高圧蒸気滅菌

滅菌条件：圧力 1.05kg/cm²

温度 134℃ 時間 10 分

3. 本品をフェノール系の洗浄剤で清拭しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社トータルメディカルサプライ

TEL：078-302-5595 FAX：078-302-5596

外国製造業者：メデラ エージー（スイス）

Medela AG