

機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ（16779000）

ディスポーザブル吸引チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 再滅菌・再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

＜種類＞

本品は、長さ 180cm のチューブとコネクター、及び吸引を調整できるフィンガーコントロールからなる。

＜形状＞

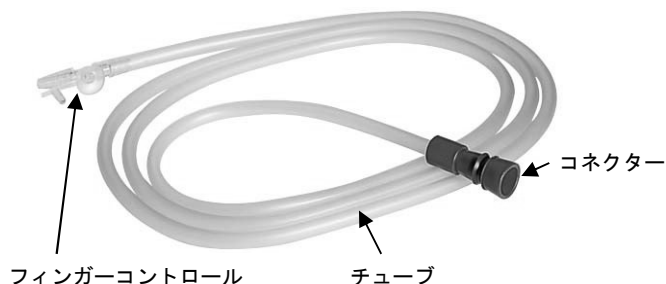

【使用目的又は効果】

廃液等を吸引するためのチューブである。

【使用方法等】

＜一般的な使用方法＞

本品は、Medela 社製品と組み合わせて使用する。

1. 新ディスポバッグ専用ボトルと新ディスポバッグを組み立てる。
2. 新ディスポバッグのトップ部分の接続口にディスポーザブル吸引チューブを接続し、使用する。

*【使用上の注意】

1. 使用前に本品に異常があった場合は使用しないこと。
2. 廃液には直接触れないこと。感染のおそれがある。
3. この製品を取り扱う際には、医療用手袋などを必ず着用すること。
触れてしまった場合は、各施設の手順に従って処置し、必要に応じて医師の診断を受けること。また、他の機器などにこれらが付着した場合はただちに拭き取ること。
4. 本品を接続の際は、緩み等の異常がないかどうか確認すること。
5. 他社製品との併用に関しては検討を行っていないため、併用する際には各施設の責任において実施すること。

*【保管方法及び有効期間等】

本品は、日の当たらない乾燥した場所冷涼な場所で、水濡れ等を回避できる場所に保管すること。[長期間直射日光や熱に曝すと、包装劣化の恐れがある]

有効期限は、包装上に記載（自己認証データによる。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社トータルメディカルサプライ

TEL：078-302-5595 FAX：078-302-5596

外国製造業者：メデラ エーゲー（スイス）

Medela AG