

機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ（16779000）

連結チューブ

再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

＜種類＞

本品は、長さ及び形状の違いにより下記の種類があり、コネクターが接続されている。

＜形状＞

連結チューブ 25cm（2 連用／4 連用）

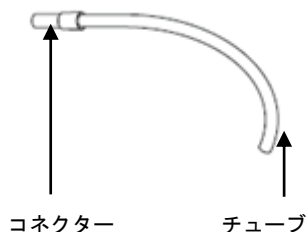

【保管方法及び有効期間等】

高温多湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所及び水がかからない場所に保管。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社トータルメディカルサプライ
TEL：078-302-5595 FAX：078-302-5596

外国製造業者：メデラ エージ（スイス）
Medela AG

【使用目的又は効果】

吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブをいう。


【使用方法等】

本品は、Medela 社製品を連結するために使用する。

＜一般的な使用方法＞

1. 用途に適したチューブを準備する。
2. 連結したい吸引ボトル間に本品を接続する。

接続例

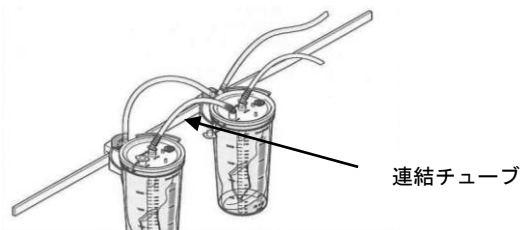

*【使用上の注意】

1. 使用前に本品に異常があった場合は使用しないこと。
2. 廃液には直接触れないこと。感染のおそれがある。
3. 本品を取り扱う際には、医療用手袋などを必ず着用すること。触れてしまった場合は、各施設の手順に従って処置し、必要に応じて医師の診断を受けること。また、他の機器などにこれらが付着した場合はただちに拭き取ること。
4. 本品を接続の際は、緩み等の異常がないかどうか確認すること。
5. 他社製品との併用に関しては検討を行っていないため、併用する際には各施設の責任において実施すること。