

機械器具 54 医療用捲綿子  
一般医療機器 一般名称：医科用捲綿子 JMDNコード：10172000

## トラストキャッチャー スワブ Type-A


再使用禁止

### 【警告・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

プラスチック軸の片側先端部に綿球を付け、それをノズルに取り付けた滅菌綿棒です。

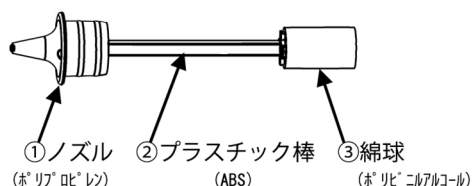

### 【保管方法及び期間等】

直射日光は避け、常温（5～30℃）で保管してください。  
使用期限：個包装に記載（自己認証による）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 モリマーメディカル株式会社  
TEL：0790-47-9009

製造元 モリマーメディカル株式会社

### 【使用目的又は効果】

検査のための試料を採取することを目的とした器具。

### 【使用方法等】

ノズル部以外には触れない様に包装袋より本品を取り出し、綿球部分で検体を採取します。

### 【使用上の注意】

1. 本品の使用は一回限りで、再使用しないでください。
2. 本品は滅菌済みであり、個装袋に破れや穴等があった場合には使用しないでください。
3. 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
4. 包装を開封した後は速やかに検体採取してください。
5. 本品に破損・曲がり・汚れなどの異常を認めた時には使用しないでください。
6. 本品は滅菌を施しており、その影響でプラスチック棒等が着色している場合がありますが、性能等に問題はありません。
7. 検体を採取するとき、採取する粘膜等の部位を傷つけないように、無理な力をかけないでください。
8. 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして、注意して取り扱ってください。
9. 本品は使用目的以外には使用しないでください。
10. 使用後は速やかに滅菌して廃棄してください。廃棄の際は、医療廃棄物等に関する規定や水質汚濁防止法等の各種規定に従い、適切な処理をしてください。