

医療用品 03 手術用手袋及び指サック  
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000  
検査検診用ニトリルグローブ

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

本品はニトリル合成ゴムを原材料とした検査・検診用の手袋である。未滅菌の使い捨てタイプである。

**＜主要寸法＞**

サイズ	掌部分の幅 (mm)	長さ(mm)
XS	70±10	220 以上
S	80±10	220 以上
M	95±10	230 以上
L	110±10	230 以上

**＜性能＞**

試験項目	老化前	老化後
引張強さ(MPa)	14.0 以上	14.0 以上
切断時伸び (%)	500 以上	400 以上

**【使用目的又は効果】**

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う際に、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

**【使用方法等】**

取出口より手袋を取出し、装着して使用する。

**【使用上の注意】**

- ・ 体質によってかゆみ、かぶれ、発疹等をおこす事があるので異常が認められる場合は使用しない事。
- ・ 包装が破損、汚損しているものは使用しない事。
- ・ 製品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しない事。
- ・ 使用中に本品が破れた場合は新しいものに取り換える事。特に鋭利な器具類に触れると破れる可能性が高くなるので注意する事。
- ・ 薬品、溶剤等によっては手袋に影響を与える可能性があるため、確認の上使用すること。  
強い化学薬品に対して長時間直接使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

- ・ 保管方法  
高温多湿、直射日光及び水濡れを避け清潔な場所に保管すること。
- ・ 有効期間  
箱の使用期限欄を参照すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

- ・ 製造販売業者  
東洋紡STC株式会社(電話番号06-4797-6000)

\*\* 外国製造業者の国名

中国

・ 販売

日本光電工業株式会社