

### 【警告】


・お子様だけでご使用にならないでください。

### 【禁忌・禁止】

・人以外の検温にはご使用にならないでください。  
・測定結果の自己判断や治療は危険ですので、医師の診断に従ってください。

### 【形状・構造及び原理等】

本体

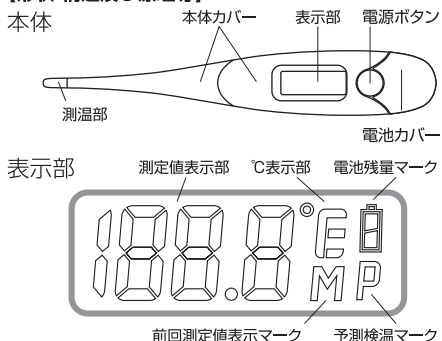

#### <表示内容>

・測定値表示部：測定した最高温度を表示

31.9℃以下は「L」を表示

43.0℃以上で「H」を表示

・前回測定値表示マーク：前回測定した測定値を表示

・℃表示部：測定した温度とともに「℃」表示

・電池残量マーク：電池の消耗時に表示

・予測検温マーク：予測検温中に表示

#### <本体の寸法および質量>

・寸法 長さ140mm 幅22mm 厚さ12mm

・質量 13g（ボタン型電池を含む）

#### <電気的定格>

・定格電圧:DC1.5V・電源:アルカリボタン型電池(LR41)

・電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器

・電源に対する保護の程度による装着部の分類：BFF形装着部

#### <原理>

測温部にあるサーミスタが温度により、電気的抵抗値が変化する特性を応用して、抵抗値の変化を集積回路で演算処理し、平衡温を予測した後、測定値を体温として表示部に表示します。

#### <付帯機能>

初期動作確認告知、実測検温終了告知、測定温度範囲外告知、

自動電源遮断機能、予測成立告知

【使用目的、効能又は効果】

測温部を部位に接触させて、脇下の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示する。

【品目仕様】

- |              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| ・種類          | : 一般用                                                 |
| ・方式          | : 予測式/測温部一体型                                          |
| ・防湿          | : 一部防湿形（JIS T 1140:2014による）                           |
| ・温度測定範囲      | : 32.0℃～42.9℃<br>31.9℃以下になると「L」表示<br>43.0℃以上になると「H」表示 |
| ・測定精度        | : ±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合)                                |
| ・温度表示        | : 3桁デジタル                                              |
| ・最小表示単位      | : 0.1℃                                                |
| ・最高温度保持機能    | : 実測した最高温度の測定値を保持する。                                  |
| ・前回測定値表示メモリー | : 前回測定した測定値を記憶保存する。                                   |
- 本品は、EMC 規格：IEC6060 1-1-2 に適合している。

#### 【操作方法又は使用方法等】

- (1) 電源ボタンを押す。
- (2) 「ビッ」音の後に表示部の全セグメントが表示される。その後、表示部右上に「C」右下に「M」が表示され、表示部右上の「C」が消え、前回測定値が2秒間表示される。
- (3) 「L」が表示され、「C」の点滅が開始し、予測検温マーク「P」が点灯し、測定可能となる。
- (4) 測温部を脇下に密着させ安静にする。  
・予測検温の場合：  
予測検温開始ブザーの「ビ」音が鳴り、検温後「ピー」音が鳴ったら、予測検温が終了である。検温結果は約3分保持される。  
・実測検温の場合：  
予測検温結果の保持後、予測検温マークが消え、実測検温になる。  
「C」の点滅から点灯になり、「ピー」音が鳴ったら、実測検温が終了である。
- (5) 表示部に測定された体温が表示される。
- (6) 電源ボタンを押せば、電源OFFになる。
- (7) 電源ボタンを押さない場合は、電源を入れてから約12分後に電源OFFになる。

#### 【使用上の注意】

- (1) 小さなお子様の手の届かないところで保管してください。また、お子様にご使用の際は、先端の測温部で目を突いたり、電池を誤飲しないよう保護者の監視下でご使用ください。
- (2) 運動、食事、入浴後は十分な時間をおいてから体温を測定してください。
- (3) 本体を強く踏まないでください。
- (4) 体温以外の測定及び、人以外の検温に使用しないでください。
- (5) 脇下以外では検温しないでください。
- (6) 本体に傷や破損がないこと確認し、異常がある場合は使用しないでください。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- (1) 高温や直射日光のあたる場所、湿気が多い場所や水のかかる場所、ほこりの多い場所、腐食性ガスの発生する場所で保管しないでください。
- (2) ご使用後は、乾いた布等で測温部を拭き、清潔な状態で収納ケースへ収納し、保管してください。

#### 【取り扱い上の注意】

- (1) 分解、改造、修理は絶対行わないでください。
- (2) 電池カバー部分は防水性がありません。電池カバー部分に水等をかけたり、本体に水等をつけたりしないでください。
- (3) 熱湯消毒はしないでください。
- (4) 丸洗いや超音波洗浄はしないでください。
- (5) 極端に曲げたり落としたり強い衝撃を与えないでください
- (6) 体温を測定する時、周囲温度が体温より高いような場合は測温部に水をかけ、測温部を冷やしてから測定し、終了のお知らせ音が鳴ったらすぐ表示値を読み取ってください。
- (7) 電池が消耗した場合、表示部の右上に電池残量マークが表示されます。このような場合、電池を交換してください。
- (8) 電池交換の方法は、取扱説明書をご参照ください。

#### 【使用の期間】

使用の期間の目安：5年（自己認証）

#### 【保守・点検に関わる事項】

- (1) 使用前に清潔な状態にし、作動するか(電源が入るか)を確認してからご使用ください。
- (2) 汚れは、中性洗剤又はアルコールを染み込ませた布でよく拭いてください。

#### 【包装】

本体・収納ケース 1台／個

【製造販売業及び製造者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社ドリテック

埼玉県越谷市流通団地2-3-9

製造元：VEGA TECHNOLOGIES INC. (中国)  
東莞東冠電子製品有限公司

連絡先

株式会社ドリテック お客様相談センター

フリーコール 0120-875-019

受付時間：月～金 9:00～12:00、13:00～17:00

（祝祭日および当社指定休日を除く）

取扱説明書を必ずご参照ください。