

【警告】

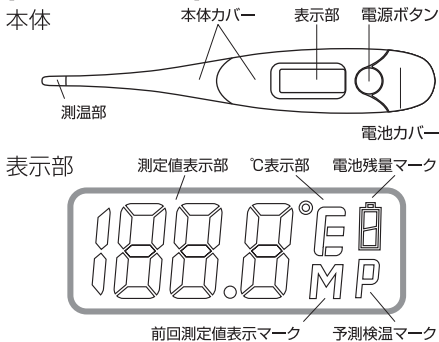
・お子様だけでご使用にならないでください。

【禁忌・禁止】

・人以外の検温にはご使用にならないでください。
・測定結果の自己判断や治療は危険ですので、医師の診断に従ってください。

【形状・構造及び原理等】

本体

**＜表示内容＞**

- ・測定値表示部：測定した最高温度を表示
31.9℃以下は「L」を表示
43.0℃以上で「H」を表示
- ・前回測定値表示マーク：前回測定した測定値を表示
- ・℃表示部：測定した温度とともに「℃」表示
- ・電池残量マーク：電池の消耗時に表示
- ・予測検温マーク：予測検温中に表示

＜本体の寸法および質量＞

- ・寸法 長さ140mm 幅22mm 厚さ12mm
- ・質量 13g（ボタン型電池を含む）

＜電気的定格＞

- ・定格電圧:DC1.5V・電源:アルカリボタン型電池(LR41)
- ・電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器
- ・電源に対する保護の程度による装着部の分類:BF形装着部

＜原理＞

測温部にあるサーミスタが温度により、電気的抵抗値が変化する特性を応用して、抵抗値の変化を集積回路で演算処理し、平衡温を予測した後、測定値を体温として表示部に表示します。

＜付帯機能＞

初期動作確認告知、実測検温終了告知、測定温度範囲外告知、自動電源遮断機能、予測成立告知

【使用目的、効能又は効果】

測温部を部位に接触させて、脇下の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示する。

【品目仕様】

- ・種類：一般用
 - ・方式：予測式/測温部一体型
 - ・防護：一部防湿形（JIST1140:2014による）
 - ・温度測定範囲：32.0℃～42.9℃
31.9℃以下になると「L」表示
43.0℃以上になると「H」表示
 - ・測定精度：±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合)
 - ・温度表示：3桁デジタル
 - ・最小表示単位：0.1℃
 - ・最高温度保持機能：実測した最高温度の測定値を保持する。
 - ・前回測定値表示メモリー：前回測定した測定値を記憶保存する。
- 本品は、EMC規格 IEC 60601-1-2：2014/
JIS規格 T1140：2014に適合しています。

【操作方法又は使用方法等】

- (1) 電源ボタンを押す。
- (2) “ビッ”音の後に表示部の全セグメントが表示される。その後、表示部右上に“℃”右下に“M”が表示され、表示部右上の“℃”が消え、前回測定値が2秒間表示される。
- (3) “L”が表示され、“℃”の点滅が開始し、予測検温マーク“P”が点灯し、測定可能となる。
- (4) 測温部を脇下に密着させ安静にする。
- ・予測検温の場合：
予測検温開始ブザーの“ビ”音が鳴り、検温後“ピー”音が鳴ったら、予測検温が終了である。検温結果は約3分保持される。
- ・実測検温の場合：
予測検温結果の保持後、予測検温マークが消え、実測検温になる。“℃”の点滅から点灯になり、“ピー”音が鳴ったら、実測検温が終了である。
- (5) 表示部に測定された体温が表示される。
- (6) 電源ボタンを押せば、電源OFFになる。
- (7) 電源ボタンを押さない場合は、電源を入れてから約12分後に電源OFFになる。

【使用上の注意】

- (1) 小さなお子様の手の届かないところで保管してください。また、お子様にご使用の際は、先端の測温部で目を突いたり、電池を誤飲しないよう保護者の監視下でご使用ください。
- (2) 運動、食事、入浴の後は十分な時間を置いてから体温を測定してください。
- (3) 本体を強く踏まないでください。
- (4) 体温以外の測定及び、人以外の検温に使用しないでください。
- (5) 脇下以外では検温しないでください。
- (6) 本体に傷や破損がないこと確認し、異常がある場合は使用しないでください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- (1) 高温や直射日光のあたる場所、湿気が多い場所や水のかかる場所、ほこりの多い場所、腐食性ガスの発生する場所で保管しないでください。
- (2) ご使用後は、乾いた布等で測温部を拭き、清潔な状態で収納ケースへ収納し、保管してください。

【取り扱い上の注意】

- (1) 分解、改造、修理は絶対行わないでください。
- (2) 電池カバー部分は防水性がありません。電池カバー部分に水等をかけたり、本体に水等をつけたりしないでください。
- (3) 熱湯消毒はしないでください。
- (4) 丸洗いや超音波洗浄はしないでください。
- (5) 極端に曲げたり落としたり強い衝撃を与えないでください
- (6) 体温を測定する時、周囲温度が体温より高いような場合は測温部に水をかけ、測温部を冷やしてから測定し、終了のお知らせ音が鳴ったらすぐ表示値を読み取ってください。
- (7) 電池が消耗した場合、表示部の右上に電池残量マークが表示されます。このような場合、電池を交換してください。
- (8) 電池交換の方法は、取扱説明書をご参照ください。

【使用の期間】

使用の期間の目安：5年（自己認証）

【保守・点検に関わる事項】

- (1) 使用前に清潔な状態にし、作動するか(電源が入るか)を確認してからご使用ください。
- (2) 汚れは、中性洗剤又はアルコールを染み込ませた布でよく拭いてください。

【包装】

本体・収納ケース 1台/個

【製造販売元及び製造者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社ドリテック

埼玉県越谷市流通団地2-3-9

製造元：VEGA TECHNOLOGIES INC. (中国)

東莞東冠電子製品有限公司

連絡先

株式会社ドリテック お客様相談センター

フリーコール 0120-875-019

受付時間：月～金 10:00～12:00, 13:00～16:00

(祝祭日および当社指定休日を除く)

取扱説明書を必ずご参照ください。