

販売名：手首式血圧計BM-103

【警告】

次の症状がある場合は医師に相談の上、慎重に使用して下さい。

1）腕部に重度の血行障害のある場合。
（循環障害に伴う体調不良になる可能性があります）

2）透析治療中、抗凝固剤、抗血小板、ステロイド剤等を使用されている場合。（内出血を起こす可能性があります）

3）糖尿病、肝臓病、動脈硬化、高血圧症などで、末梢循環障害のある方。
（血圧値に差がでる場合があります。）

4）不整脈の頻度の高い方、測定部の血流が少ない方。
（正しく測定できない場合があります）

5）腕部の皮膚に創傷のある方、腕部に出血を伴う症状、外傷、腫れ物のある方。（症状が悪化する可能性があります。）

【禁忌・禁止】

適正に血圧計をご使用頂くための注意事項

・測定結果の自己診断、治療は行なわず、医師の診断に従って下さい。

・腕に点滴静脈注射や輸血を行っている場合、傷など未治療の腕には手首カフを巻かないで下さい。けがや事故を起こすおそれがあります。

・ステントを留置した腕に手首カフを巻かないで下さい。

・病院内の麻酔ガスなど可燃性ガスの近くで使用しないで下さい。引火の可能性があります。

・機器を修理・改造・分解しないで下さい。

・専用のカフ以外は使用しないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

(1) 構成

本体

表示部

測定・停止ボタン

記憶ボタン

設定ボタン

電池フタ

手首カフ

(2) 付属品

単4形乾電池（動作確認用）	2本
取扱説明書（保証書付）	1部
医療機器添付文書	1部
血圧測定記録用紙	1部

(3) 本体の寸法及び質量

本体寸法	約 73mm×68mm×23mm (手首カフ含まず)
本体質量	約 95g (電池含まず)

(4) 電気的定格

電源	単4形乾電池2本（DC3V）
電撃に対する保護の形式による分類	内部電源機器（乾電池）
電撃に対する保護の程度による装着部の分類	BF形装着部

(5) 動作原理

カフ内圧力を最高血圧以上に徐々に加圧していくと、カフ内圧力に心拍と同期した脈動現象が現れます。この脈動の始始めは小さく、加圧に従い大きくなり、やがて最大振幅を示した後、再び小さくなる山型のパターンになります。オシロメトリック方式の血圧計は、この脈動分の振幅波形情報とカフ内圧力をマイクロコンピューターで解析し、最高血圧および最低血圧を決定しています。

【使用目的又は効果】

健康管理のために収縮期血圧及び拡張期血圧を非観血的に測定すること。

- 【使用方法等】
1. 使用前
- 1) 電池を入れます。（付属の電池は動作確認用です。
お早めに新品の単4乾電池と交換して下さい。）
- 2) 日付・時刻を合わせます。
 - ・「設定」ボタンを長押し(3秒以上)すると「年」が点滅します。
 - ・「記憶」ボタンを押して「年」を合わせます。
 - ・「設定」ボタンを押すと「年」が確定し「月」が点滅します。
 - ・同じ手順で、「月」→「日」→「12h」
あるいは、「24h」→「時」→「分」を設定します。
 - ・「mmHg」は、「設定」ボタンを押して確定します。
 - ・「mmHg」以外の設定内容が順番に表示され電源が切れます。
2. 使用中
- 1) 左手の手のひらを上に向け、表示部を上にしてかぶせます。
手首カフの端が手首と手のひらの境目から約1～1.5cm人差し指1本分程度あけてかぶせます。手首カフの先を持って引っ張りながら、ぴったり巻上げます。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- 2) テーブルなどにひじをつけ、カフと心臓の高さを合わせます。
手のひらを上にして力を抜いて安静にしてください。
- 3) 「測定・停止」ボタンを押します。
手首カフが自動的に加圧して測定が始まります。
- 4) 測定が終了すると血圧値・脈拍数・血圧値レベルが表示されます。
自動的にカフの空気が抜けます。
- 5) 終了、又は途中で中止する場合は、「測定・停止」ボタンを押して電源を切ります。

3. 使用後

- 1) 「測定・停止」ボタンを押して電源を切ります。
何も操作しないと、約1分間で自動的に電源が切れます。
- 2) 記録した測定値を呼出すこともできます。
「記憶」ボタンを押すごとに、記憶された新しい測定値から順に表示されます。
「設定」ボタンを押すごとに、記憶された古い設定値から順に表示されます。
60回分の測定値を記憶できます。

【使用上の注意】

(1) 使用条件及び環境上の注意事項

- ① 修理・改造はしないで下さい。
- ② 本体に水などをこぼさないで下さい。
- ③ 浴室などの湿度の高いところ、水のかかりやすいところでは使用しないで下さい。
- ④ 電子レンジなど電磁波を発生する機器を近づけないで下さい。
誤作動する可能性があります。
- ⑤ 小さな子どもには使用させないで下さい。
- ⑥ 身体の自由が利かない方には使用させないで下さい。
- ⑦ 次のようなときには使用しないで下さい。
・疲労が激しいとき ・酒に酔っているとき
・入浴直後 ・喫煙直後

(2) 使用中の注意事項

- ① 機器に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止して下さい。
- ② 身体に及び機器に異常を感じたときには、使用を直ちに中止して下さい。
- ③ 他の治療器と同時に使用しないで下さい。

(3) 使用後の注意

お手入れの際は、本体を乾いた布で拭いて下さい。
シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないで下さい。
変色、変形の原因になります。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 長時間ご使用にならない場合は、お子様の手の届かない、
湿気の少ない場所に保管して下さい。
- 2) 氷点下近くで保管した場合は、10℃～40℃の場所に1時間以上
放置してから使用して下さい。
- 3) しばらく使用していなかった本製品を使用するときには、
正常・安全に作動することを確認してからご使用下さい。
- 4) 耐用期間は4年又は1万回のいずれか早く到達した方です。

【取り扱い上の注意】

- 1) 取り扱いを間違えると不具合を生じることがあるので、使用方法、
使用上の注意等を厳守して下さい。
- 2) 本品を廃棄する際は、地域で定める条例に従って廃棄して下さい。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 商品に故障または異常が認められた時には、下記の連絡先にお問い合わせ下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社ドリテック
住 所	埼玉県越谷市流通団地2-3-9
製 造 業 者	Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd.
国 名	中華人民共和国
連 絡 先	株式会社ドリテック お客様相談センター 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9 電話：0120-875-019 (月～金10:00-12:00, 13:00-16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

取扱説明書を必ずご参照ください。