


【警告】
・お子様だけでご使用にならないでください。

【禁忌・禁止】
・人以外の検温にはご使用にならないでください。
・測定結果の自己判断や治療は危険ですので、医師の診断に従ってください。

【形状・構造及び原理等】

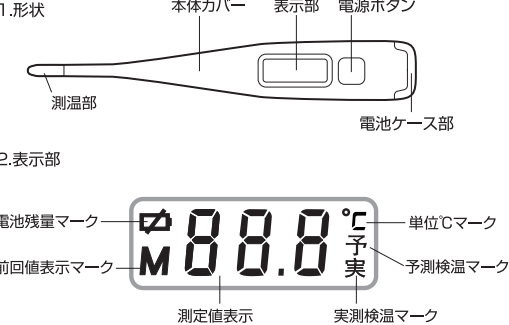

- 2.表示部
- 3.本体の寸法および質量
寸法 長さ139 ×幅21× 厚さ13.5mm
質量 15g（電池を含む）
- 4.電気的定格
定格電圧:DC1.5V
電源:アルカリボタン電池LR41×1個
電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器
電源に対する保護の程度による装着部:分類:BF形装着部
- 5.原理
測温部にあるサーミスタが温度により、電気的抵抗値が変化する特性を応用して、抵抗値の変化を集積回路で演算処理し、平衡温を予測した後、測定値を体温として表示部に表示します。
- 6.原材料(体に接する部分)
測温部:SUS304
本体カバー:ABS
- 7.付帯機能
初期動作確認告知、予測成立告知、実測検温終了告知、測定温度範囲外告知、オートパワーオフ、前回値メモリ
- 8.品目仕様
温度測定範囲: 32.0~42.0℃
測定精度 : ±0.1℃（高温水槽で実測測定した場合）
使用環境 : 10~40℃、30~85%RH（結露なきこと）

【使用目的、効能又は効果】
測温部を部位に接触させて、脇下の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示すること。

- 【使用方法等】
- (1) 電源ボタンを押す。
- (2) “ピッ”音とともに表示部が全表示される。
次に、表示部に“M”が表示され、前回の検温結果が表示される。
- (3) 表示部に“L”が表示され、予測検温マーク“予”と“℃”の点滅が開始すれば測定可能となる。
- (4) 測温部を脇下に密着させ安静にする。
- (5) 予測検温の場合：
測定開始後、約10秒後にブザー音が鳴ったら、予測検温が終了した合図で、表示部に予測検温された体温が表示される。
検温結果は約3分保持される。

- (6) 実測検温の場合：
予測検温結果の保持後にブザー音とともに予測検温マーク“予”が消え、同時に“℃”と実測検温マーク“実”が点滅になる。
約12分30秒で実測検温マーク“実”が点灯になったら、表示部に実測検温された体温が表示される。
- (7) 電源ボタンを押せば、電源OFFになる。
- (8) 電源ボタンを押さない場合は、電源を入れてから約15分後に電源OFFになる。

【使用上の注意】

- (1) 小さなお子様の手の届かないところで保管してください。また、お子様にご使用の際は、先端の測温部で目を突いたり、電池を誤飲しないよう保護者の監視下でご使用ください。
- (2) 運動、食事、入浴の後は十分な時間をおいてから体温を測定してください。
- (3) 体温以外の測定及び、人以外の検温に使用しないでください。
- (4) 脇下以外では検温しないでください。
- (5) 本体に傷や破損がないこと確認し、異常がある場合は使用しないでください。

【保管方法及び使用期間等】

- (1) 高温や直射日光のあたる場所、湿気の多い場所や水のかかる場所、ほこりの多い場所、腐食性ガスの発生する場所で保管しないでください。
- (2) ご使用後は、乾いた布等で測温部を拭き、清潔な状態で収納ケースへ収納し、保管してください。
- (3) 標準的な使用期間の目安:5年(自己認証による)

【取り扱い上の注意】

- (1) 取り扱いを間違えると不具合を生じることがあるので、使用方法、使用上の注意を厳守してください。
- (2) 電池ケース部分は防水性がありません。電池ケース部分に水等をかけたり、本体に水等をついたりしないでください。
- (3) 熱湯消毒はしないでください。
- (4) 丸洗いや超音波洗浄はしないでください。
- (5) 極端に曲げたり落としたり強い衝撃を与えないでください
- (6) 体温を測定する際、周囲温度が体温より高いような場合は測温部に水をかけ、測温部を冷やしてから測定し、終了のお知らせ音が鳴ったらすぐ表示値を読み取ってください。
- (7) 電池が消耗した場合、表示部に電池残量マークが表示されます。このような場合、電池を交換してください。
- (8) 電池交換の方法は、取扱説明書をご参照ください。
- (9) 本品を廃棄する際は、地域で定める条例に従って廃棄してください。

【保守・点検に関わる事項】

- (1) 使用前に清潔な状態にし、作動するか(電源が入るか)を確認してからご使用ください。
- (2) 汚れは、中性洗剤又はアルコールを染み込ませた布でよく拭いてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社ドリテック
製造業者：Onbo Electronic (Shenzhen) Co.,Ltd.（中国）
連絡先：株式会社ドリテック お客様相談センター
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
電話：0570-075-019
(月～金 9:00-12:00,13:00-17:00
祝祭日および当社指定休日を除く)