

【警告】


・お子様だけでご使用にならないください。

【禁忌・禁止】

・人以外の検温にはご使用にならないください。
・測定結果の自己判断や治療は危険ですので、医師の診断に従ってください。

【形状・構造及び原理等】

1.形状

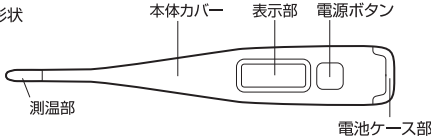

2.表示部



3.本体の寸法および質量

寸法 長さ139 ×幅21 ×厚さ13.5mm

質量 15g (電池を含む)

4.電気的定格

定格電圧:DC1.5V

電源:アルカリボタン電池LR41×1個

電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器

電源に対する保護の程度による装着部分類：BF形装着部

5.原理

測温部にあるサーミスタが温度により、電気的抵抗値が変化する特性を応用して、抵抗値の変化を集積回路で演算処理し、平衡温を予測した後、測定値を体温として表示部に表示します。

6.原材料(体に接する部分)

測温部:SUS304

本体カバー:ABS

* 7.付帯機能

初期動作確認告知、予測成立告知、実測検温終了告知、測定温度範囲外告知、電池残量表示、オートパワーオフ、前回値メモリー

* 8.品仕様

温度測定範囲：32.0～42.0℃

測定精度：±0.1℃ (恒温水槽で実測測定した場合)

使用環境：10～40℃、30～85%RH (結露なきこと)

【使用目的、効能又は効果】

測温部を部位に接触させて、脇下の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示すること。

【使用方法等】

- 電源ボタンを押す。
- "ピッ"音とともに表示部が全表示される。
次に、表示部に"M"が表示され、前回の検温結果が表示される。
- 表示部に"L"が表示され、予測検温マーク"予"と"℃"の点滅が開始すれば測定可能となる。
- 測温部を脇下に密着させ安静にする。
- 予測検温の場合：
測定開始後、約10秒後にブザー音が鳴ったら、予測検温が終了した合図で、表示部に予測検温された体温が表示される。
検温結果は約3分保持される。

- 実測検温の場合：
予測検温結果の保持後にブザー音とともに予測検温マーク"予"が消え、同時に"℃"と実測検温マーク"実"が点滅になる。
約12分30秒で実測検温マーク"実"が点灯になったら、表示部に実測検温された体温が表示される。
- 電源ボタンを押せば、電源OFFになる。
- 電源ボタンを押さない場合は、電源を入れてから約15分後に電源OFFになる。

【使用上の注意】

- 小さなお子様の手の届かないところで保管してください。また、お子様にご使用の際は、先端の測温部で目を突いたり、電池を誤飲しないよう保護者の監視下でご使用ください。
- 運動、食事、入浴の後は十分な時間をおいてから体温を測定してください。
- 体温以外の測定及び、人以外の検温に使用しないでください。
- 脇下以外では検温しないでください。
- 本体に傷や破損がないこと確認し、異常がある場合は使用しないでください。

【保管方法及び使用期間等】

- 高温や直射日光のあたる場所、湿気の多い場所や水のかかる場所、ほこりの多い場所、腐食性ガスの発生する場所で保管しないでください。
- ご使用後は、乾いた布等で測温部を拭き、清潔な状態で収納ケースへ収納し、保管してください。
- 標準的な使用期間の目安:5年(自己認証による)

【取り扱い上の注意】

- 取り扱いを間違えると不具合を生じることがあるので、使用方法、使用上の注意を厳守してください。
- 電池ケース部分は防水性がありません。電池ケース部分に水等をかけたり、本体に水等をつけたりしないでください。
- 熱湯消毒はしないでください。
- 丸洗いや超音波洗浄はしないでください。
- 極端に曲げたり落したり強い衝撃を与えないでください
- 体温を測定する時、周囲温度が体温より高いような場合は測温部に水をかけ、測温部を冷やしてから測定し、終了のお知らせ音が鳴ったらすぐ表示値を読み取ってください。
- 電池が消耗した場合、表示部に電池残量マークが表示されます。このような場合、電池を交換してください。
- 電池交換の方法は、取扱説明書をご参照ください。
- 本品を廃棄する際は、地域で定める条例に従って廃棄してください。

【保守・点検に関わる事項】

- 使用前に清潔な状態にし、作動するか(電源が入るか)を確認してからご使用ください。
- 汚れは、中性洗剤又はアルコールを染み込ませた布でよく拭いてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ドリテック
製造業者：Onbo Electronic (Shenzhen) Co.,Ltd. (中国)
連絡先：株式会社ドリテック お客様相談センター
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
電話：0570-075-019
(月～金 9:00-12:00,13:00-17:00
祝祭日および当社指定休日を除く)