

器 58 整形用機械器具
 一般医療機器 骨手術用器械 70962001
 (整形外科用バー 36249001 手術用ドリルアタッチメント 37870001)

ORTHOLOC 3Di 器械

【形状・構造及び原理等】

本品は、当社製体内固定用インプラントの手術の際に使用する手術器械である。手動式のもの、アタッチメント等に取り付けて主に能動機器に接続して使用するものがある。未滅菌品であり、用時滅菌の上使用される。

〈構成品の形状〉

1. エレベーター


エレベーター、カーブ



エレベーター、ストレート




2. オープニング ウェッジ スプレッター

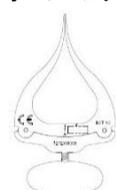

3. カウンターシンク

カウンターシンク キャニュレイテッド、2.8mm

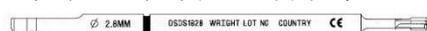

カウンターシンク キャニュレイテッド、5.0mm



カウンターシンク キャニュレイテッド、6.0mm



DARCO ヘッド付き カウンターシンク、2.7/3.5/4.0/4.5mm スクリュー用




DARCO ヘッド付き カウンターシンク、6.5/7.5mm スクリュー用



4. 仮固定ピン

仮固定ピン 1.1mm、仮固定ピン 1.4mm

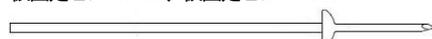

足部プレート用仮固定ピン 1.1mm



5. クイックコネクトハンドル

LOCON-T クイックコネクトハンドル



7. OMLC クイックコネクトハンドル



6. クリーニングスタイルット



7. シングル トロカール ワイヤ




8. スクリューグリッパー


スクリューグリッパー




CLAW スクリューグリッパー

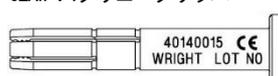

ORTHOLOC 3Di スクリューグリッパー

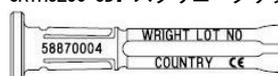

9. スレディッド ベンディング アイロン

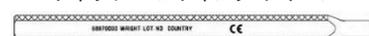

10. デプスゲージ


デプスゲージ



ミニスクリューデプスゲージ



DARCO ヘッド付き デプスゲージ

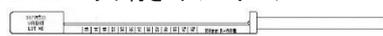

SMALL SCREW デプスゲージ




11. ドライバー



スタードライバー、T7、T10

スタードライバー、T15

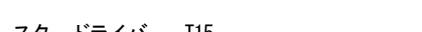


スタードライバー キャニュレイテッド、T10




スタードライバー キャニュレイテッド、T15



ヘックスドライバー キャニュレイテッド、2.0mm

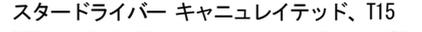


DARCO ヘッド付き ヘックスドライバー、2.5mm

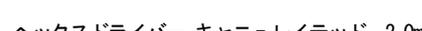


DARCO ヘッド付き ヘックスドライバー、5mm




Pro-Toe C2 ドライバー、T8

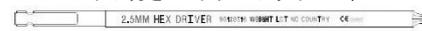

12. ドライバーハンドル
ラチェット ドライバーハンドル

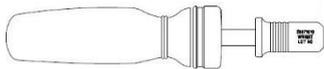

CLAW ラチェット ドライバーハンドル

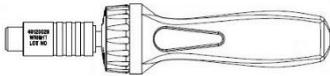

トルクドライバーハンドル



13. ドリルガイド
ドリルガイド、2.5mm インサート/3.5mm OD、2.5mm インサート/4.0mm OD、
2.8mm インサート/4.0mm OD



ドリルガイド、2.0/22.4




ドリルガイド、2.0/2.5、2.8/3.0、3.5/4.0



ロックリング ドリルガイド、1.3mm、1.6mm




ロックリング ドリルガイド、2.5

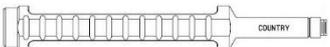

ロックリング ドリルガイド、2.0mm、2.8mm



ポリアクシシャル ドリル ガイド

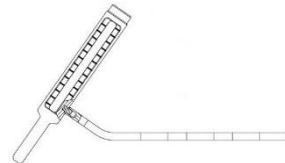

ポリアクシシャルロックリングドリルガイド



14. ドリルスリーブ
ドリルスリーブ



DARCO ヘッド付き ドリルスリーブ




15. ドリルビット

ドリルビット、1.3mm、1.6mm



ドリルビット、2.0 x 30mm

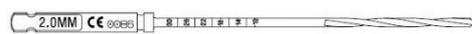


ドリルビット、2.5mm



ドリルビット、2.5 x 60mm、2.8 x 60mm



ドリルビット、3.5 x 60mm、4.0 x 60mm

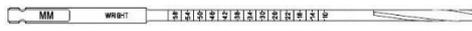

ドリルビット キャニューレイテッド、2.2mm



ドリルビット キャニューレイテッド、2.5mm、3.0mm



DARCO ヘッド付き ドリルビット、2.7mm




DARCO ヘッド付き ドリルビット、4.4mm



16. フォーセップアングルチップ




17. プレートカッター

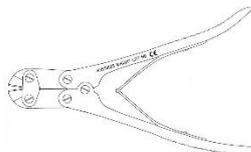


18. プレート タック




19. プレートベンダー
スロットテッド プレートベンダー

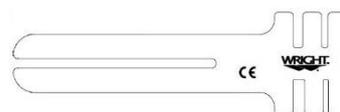

プレートベンダー

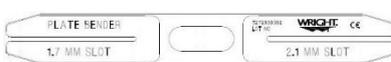

20. ボーンフォーセップス

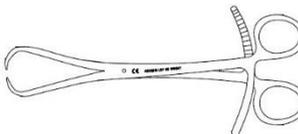


21. ボーンピック



22. 骨打ち込み器




23. 骨鉗子 無鉤

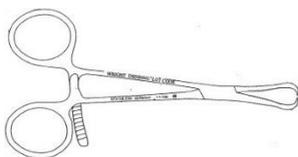

24. A0 クイック コネクト キャニュレイテッド



25. DARCO ヘッド付き ティッシュスリーブ

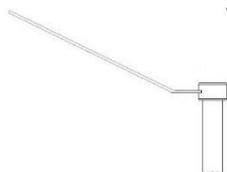

26. K ワイヤー

K ワイヤー、0.9 x 150mm、1.1 x 150mm、1.4 x 150mm



K ワイヤー、2.0 x 228mm



K ワイヤー、2.5 x 150mm



DARCO ヘッド付き K ワイヤー、1.2 x 150mm



DARCO ヘッド付き K ワイヤー、2.5 x 270mm



27. K ワイヤーガイド




28. MTP カップリーマー GEN2




29. MTP コーンリーマー GEN2




30. SHIFT FIX インサーター

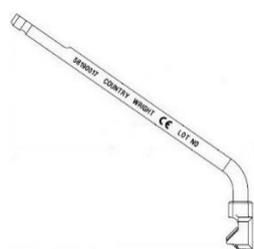


31. SHIFT FIX カuttingガイド

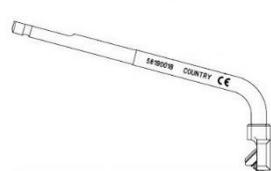

32. SHIFT FIX ディスプレースメント インサーター

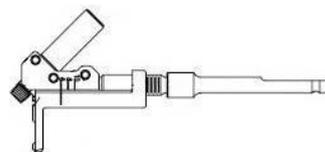

33. X-TRACK ディストラクター

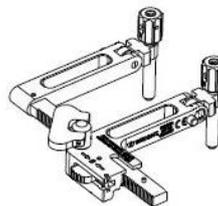

34. トライアル MTP フュージョンプレート




35. トライアル MTP フュージョン リビジョンプレート




36. トライアル BOW プレート



37. トライアル Lapidus プレート

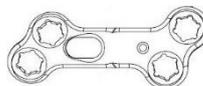


38. トライアル 1st Ray プレート

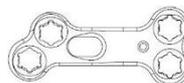

39. トライアル MF フュージョン U プレート



40. トライアル MF フュージョン T プレート

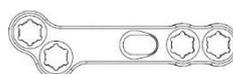


41. トライアル MF フュージョン ストレートプレート




42. トライアル メディアル コラム フュージョンプレート




43. トライアル N/C フュージョンプレート

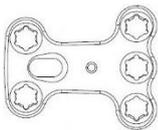


44. トライアル Evans オープン ウェッジプレート

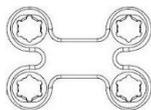


45. トライアル Cotton ウェッジプレート

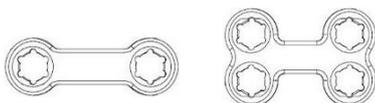


46. トライアル シフト フィックス MDCO プレート

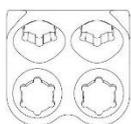


47. トライアル ロッキング スクリュー

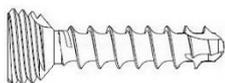


48. トライアル LP コーティカル スクリュー

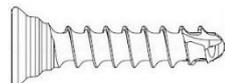

49. トライアル DART-FIRE スクリュー ヘッド付

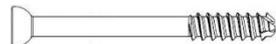

50. トライアル DART-FIRE スクリュー ヘッドなし

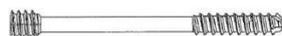

〈材質〉

金属部：ステンレス鋼、アルミニウム合金、チタン合金、純チタン
樹脂部：シリコーン、フェノール樹脂、FKM

〈原理〉

骨接合手術において、骨を固定し、骨癒合を補助する。

【使用目的又は効果】

本品は、骨接合手術等の骨手術に用いる手術器械である。

【使用方法等】

本品は未滅菌のため、必ず汚染除去、洗浄及び滅菌の上、使用する。
下記条件または医療機関で検証された条件により高圧蒸気滅菌してから使用する。

滅菌温度 132℃、滅菌時間 4分

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

清潔で乾燥した場所に保管する。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 分解可能な器具は分解してから洗浄する。
- ・ 連結式の器具は、隙間を開放状態にして洗浄する。
- ・ 洗浄の際、器具を傷つけるような金属製のブラシ、スクラブ、パッド等は使わない。また、塩素、ソーダ、有機溶媒、アンモニア酸、アンモニア溶媒（例：アセトン）などの器具に損傷を与える化学薬品類は使わない。
- ・ ポリマー製器具およびトレーの自動機械洗浄サイクル後、アルカリ性残留物の中和にリン酸を使用しない。
- ・ 使用後は速やかに汚染除去、洗浄、滅菌する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： ライトメディカル株式会社
電話番号：0120-432-352

製造業者： 製造業者：ライト メディカル テクノロジー インク
Wright Medical Technology, Inc. (米国)