

添付文書

医療用品(4) 整形用品 JMDN コード 34864000 一般医療機器 救急絆創膏
ソフトファインシート

【禁忌・禁止】


再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1, 概要

医療用の衛生材料である。

2, 形状、構造

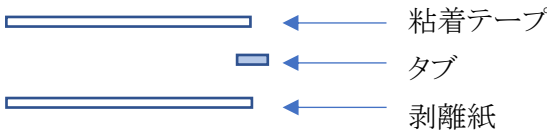

3, 原材料

粘着テープ:ポリウレタン、アクリル系粘着剤

4, 原理

本品を穿刺部もしくは創傷面に貼付することにより、被覆保護を行い衣服等の非衛生物からの接触防止を図る。

5, 寸法

粘着テープ:50mm×50mm

【使用目的又は効果】

注射針・カテーテル等の穿刺部及び創傷面の被覆保護

【操作方法又は使用方法等】

清潔にした貼付部位粘着テープを貼り固定する。

【使用上の注意】

- ① 明らかに感染を有している部位には使用しないでください。
- ② 貼付部位から滲出液や出血がみられる場合には使用しないでください。
- ③ 貼付部位とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って使用してください。水気があると付きにくい場合があります。特に消毒剤・液剤等はよく乾燥させてから使用してください。
- ④ 1 日 1～2 回貼る場所を少しずらして貼りかえてください。
- ⑤ 使用中、発疹、発赤、かゆみ、痛み等のかぶれの症状があらわれた場合には使用を中止して医師又は薬剤師へ相談してください。
- ⑥ 救急絆創膏にかぶれやすい方は注意してご使用ください。
- ⑦ 皮膚刺激の原因になりますので、テープを引っ張った状態では貼らないでください。

⑧ 剥がす際は皮膚を抑えながらゆっくり剥がしてください。

⑨ 原材料(ポリウレタン)の特性上、紫外線等の影響で黄変することがありますが、製品の有効性・安全性に影響はございません。

【保管方法及び有効期間等】

1, 保管方法

- ① 水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。

2, 有効期限

容器または被包に表示【自己認証(自社データ)による】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者 トイメディカル株式会社

〒861-3131

熊本県上益城郡御船町豊秋 750-1

TEL:096-281-0007

販売(問い合わせ先)

株式会社アグリス

〒834-0055

福岡県八女市鵜池 477-1

TEL:0943-30-1177