

器 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ （70469000）

けん引支柱／B 4 0

【警告】


- ・常に患者の状態を監視すること。
[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因になります]

【禁忌・禁止】

1. 本品への二次加工禁止
本品表面に衝撃や振動等を用いての刻印や改造等の二次加工はしないこと。[折損の原因になります]
2. 粗雑な取扱いの禁止
本品を変形あるいはキズをつける等、また、過度の負荷がかかる製品と併用しないこと。[破損、欠損の原因となります。]

【形状・構造及び原理等】

材質：ステンレス鋼 アルミ合金

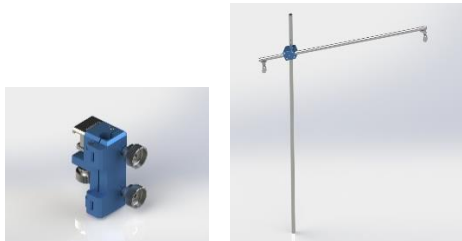

製品番号	製品名
B40-001-010	レールクランプ
B40-001-020	支柱

【使用目的又は効果】

本品は、手術台に取り付けて、上肢を意図した位置に保持するための器具であり、再使用可能である。

【使用方法等】

本品は未滅菌品です。

本品の使用前には必ず外観、機能検査等の点検を行い、破損、汚れ、異物付着がないことを確認し、消毒等を行うこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - ・締結部の固定状況は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして、患者の体位ずれが起きる恐れがあります。
 - ・取付が適切であり、正常に機能するか点検すること。
 - ・長時間の使用や患者を動かしたりゆすったりした場合、機器の固定が緩む可能性があるため、使用中も機器にゆるみがないことを確認すること。
 - ・使用中は機器及び患者に異常のないことを常に監視すること。
 - ・機器及び患者に異常が発見された場合は適切な処置をとること。
 - ・使用後は本品に破損、汚れ、異物付着、損傷等がないことを確認すること。
2. 不具合・有害事象
 - 不具合
使用中の機器の固定の緩みによる患者の体勢ずれ
製品の折損、破損、変形、分解、動作不良
 - 有害事象
感染症、アレルギー、周囲等の神経障害、血管・神経損傷、骨折、褥瘡、その他併症等。

3. 過剰使用

- ・本品の使用に際し、意図しない使用方法の場合、応力による変形、折損の場合があり、正しく機能しなくなる。
- ・経年の度重なる使用による反復的な応力により、疲労を起し破損に至ることがあるため、使用前に点検を行い、異常が見られたら使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

本品は高温・高湿・直射日光を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項〉

本品は日常点検及び使用前点検により正常に機能することを確認すること。汚れ、キズ、損傷等や異常が見られた場合には使用せず適切な処置を行うこと。

〈洗浄〉

- (1) 使用後は、早急に付着溶液、付着物等がある場合は速やかに除去すること。
- (2) アルカリ性、強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。
- (3) 汚れの残存がある箇所には柔らかいブラシ、スポンジを使い、入念に除去すること。
- (4) 付着物の除去に金属たわし、クレンザー（磨き粉）等の使用や過度の力を加えると器具の表面が損傷し、変形や機能低下の原因となるので使用しないこと。
- (5) 隙間部分に異物等の残存がないようにし、乾燥した状態で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

トウルーシード株式会社

TEL 075-708-5275