

プラスオーソ イージーポジショナー

【警告】

- 常に患者の状態を監視すること。
【長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因になります】

【形状・構造及び原理等】

材質：ステンレス鋼 合成樹脂 合皮



製品番号	製品名
P0-010-020	AL60 骨盤固定器
P0-010-030	延長アダプター
P0-010-040	AL60 骨盤角度計

【使用目的又は効果】

本品は、手術台に付属するアクセサリであり、再使用可能である。

【使用方法等】

専用品に組み合わせて使用すること。

本品は未滅菌品です。

- 骨盤固定器は清拭、消毒が可能ですが、滅菌できません。
・使用前に骨盤固定器を消毒し、破損、汚れ、異物付着がないことを確認する。
- 延長アダプター、骨盤角度計は洗浄、消毒が可能ですが、滅菌できません。
・使用前に必要なに応じて洗浄・消毒し、破損、汚れ、異物付着がないことを確認する。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして、患者の体位ずれが起きる恐れがあります。
 - 本品のご使用前には必ず外観検査等の点検を行い、洗浄、消毒を行うこと。
 - 取付が適切であり、正常に機能するか点検すること。
 - 長時間の使用や患者を動かしたり、ゆすったりした場合、機器の固定が緩む可能性があるため、使用中も機器にゆるみのないことを確認すること。
 - 使用中は機器及び患者に異常のないことを常に監視すること。
 - 機器及び患者に異常が発見された場合は適切な処置をとること。
 - 使用後は本品に破損、汚れ、異物付着、損傷等がないことを確認すること。
- 不具合・有害事象

不具合
使用中の機器の固定の緩みによる患者の体勢ずれ
製品の折損、破損、変形、分解、動作不良

有害事象
感染症、アレルギー、周囲等の神経障害、血管・神経損傷、骨折、褥瘡、その他合併症等。
- 過剰使用
 - 本品の使用に際し、意図しない使用方法の場合、応力による変形、折損の場合があり、正しく機能しなくなる。
 - 経年の度重なる使用による反復的な応力により、疲労を起こし破損に至ることがあるため、使用前に点検を行い、異常が見られたら使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 骨盤固定器は水ぬれに注意すること。
- 化学薬品や溶剤等の影響がある場所には保管しないこと。
- 本品は高温・高湿・直射日光を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項〉

本品は日常点検及び使用前点検により正常に機能することを確認すること。汚れ、キズ、損傷等や異常が見られた場合には使用せず適切な処置を行うこと。

〈洗浄及び滅菌〉

1. 骨盤固定器

- 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品・汚染等は直ちに清拭、消毒すること。
- 薬液等には浸漬しないこと。
- 滅菌しないこと。
- 清拭する場合は、消毒用アルコール等を使用し、表皮材を損傷する溶剤を含む薬液は使用しないこと。

2. 延長アダプター、骨盤角度計

- 使用後は、早急に洗浄もしくは清拭すること。
- 強アルカリ、強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。
- 汚れの残存がある箇所には柔らかいブラシ、スポンジを使い、入念に洗浄すること。
- 洗浄に金属たわし、クレンザー（磨き粉）等の使用や過度の力による洗浄は器具の表面が損傷し、変形や機能低下の原因となるので使用しないこと。
- 洗浄装置（超音波洗浄装置等）で洗浄する時には、他の器具等と接触して損傷することがないように取扱うこと。
- 隙間部分に異物等の残存がないよう入念に洗浄すること。
- 洗浄後はすぐに乾燥させること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

トールシーード株式会社

TEL 075-708-5275