

2025年 5月 1日作成 (第1版)

医療機器届出番号 12B2X1003600001

器 54 医療用捲綿糸

一般医療機器 医療用捲綿糸 10172000

再使用禁止

エンジェル綿棒

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、軸の片側に繊維を巻き付けた綿棒である。(滅菌済み)

全長 約 150mm

綿長 約 4-5mm

綿径 約 4mm

【使用目的又は効果】

本品は検査のための試料を採取する器具である。

【使用方法】

- 個包装袋の開封口をつかみ、綿体部分に触れないように軸部分をつまんで包装から取り出す。
- 綿体部分で検体を採取する。検体採取は適切な方法、操作で行う。

【使用上の注意】

1. 使用に関する注意

- 検体を採取する時は、力を入れすぎたり強く押ししたりして綿棒の軸を折り曲げたりしないこと。
- 検体を採取する前に軸部分を折り曲げたり変形させて使用しないこと。

3. 検体を直接採取する時は、採取する粘膜などの部位を傷つけないように注意すること。

2. その他の注意

- 開封後は速やかに使用すること。
- 使用後は滅菌処理をしてから廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

常温保存で、高温多湿や直射日光を避け、水濡れしないように保管すること。

2. 有効期間等

本品の使用期限は包装に記載。(自己認証(自社データ)による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

東京天使医薬株式会社 日本本社

千葉県千葉市中央区宮崎町 531 番地 24

TEL : 043-497-6359