

器具器械 65 歯科用充填器
歯科用充填器 (70680000)

デップラー CR 充填形成器

【形状・構造及び原理等】

ZI66X 寸法 176mm
OP3X 寸法 175mm
125X 寸法 173mm
OP55X 寸法 173mm

【使用目的又は効果】

複合レジン充填材を窩洞内に充填したり、圧接成形する際に用いる。

【使用方法等】

- 1) 器具を使用する前に必ず使用上の注意を読むこと。
- 2) 仕様前・使用後に作業部・柄部に破損・ヒビ・傷、及び腐食等がないか確認のうえ、使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
 - ①ステンレス鋼を使用しているため、鉄と比較して錆にくい金属であるが使用方法、環境によっては腐食することがあるので注意すること。
 - ②破損等の原因となるので、器具に対して曲げ、切削、打刻等の二次加工（改造）を絶対に行わないこと。
 - ③家庭用洗剤には金属を腐食させることがあるので使用しないこと。洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
 - ④超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
 - ⑤金属を腐食させるので化学性ガスを用いたオートクレーブ滅菌器を使用しないこと。
 - ⑥次の薬剤は金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸コロールヘキシジン
 - ⑦薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文章に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがあるので注意すること。
 - ⑧使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ⑨洗浄、消毒、滅菌には出来るだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
 - ⑩加熱滅菌器の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質または変色することがある。
 - ⑪洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆、シミ等の原因になることがある。
 - ⑫腐食の原因となるので洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。
 - ⑬本品は【使用目的、性能又は効果】に記載以外には使用しないこと。
 - ⑭本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①ステンレススチールに対するアレルギーの既往歴がある患者には使用しないこと。
 - ②本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品は湿度の高い場所に長時間保管すると金属部が錆びる恐れがあるので、乾燥した場所に保管すること。
- ・本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【保守・点検に係わる事項】

- ・不純物が付着していないか確認する事。

【製造販売業者又は製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者： 内外歯材株式会社
住所： 〒543-0062
大阪府大阪市天王寺区逢阪 2-3-10
電話番号： 06-6771-5553
FAX 番号： 06-6779-7518

輸入元： A. DEPPELER 社（スイス）