

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材（70904000）

プロフィーライン

【形状・構造及び原理等】

- 1) 成分
グリセリン、リン酸二水化ナトリウム、水
- 2) 形状
95 g 入

色	RDA (相対的象牙質損耗値)
イエロー	40
レッド	120
グリーン	170
ブルー	250

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 内外歯材株式会社
住所： 〒543-0062
大阪府大阪市天王寺区逢阪 2-3-10
電話番号： 06-6771-5553
FAX 番号： 06-6779-7518

外国製造所： Alfred Becht 社
国名： ドイツ

【使用目的又は効果】

- ・ペースト状の半固形状の研磨材で、歯科衛生士、歯科医師が歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

1. 本材を用途により使用する分だけ容器に取り出す。
2. ブラシ、歯磨カップ等に少量ずつ付け、歯科用駆動装置及びハンドピース等に用いて低速回転にて使用する。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
- ①本材は研磨材なので使い過ぎに注意すること。
 - ②使用前、使用后に点検を行い、汚染がある場合は除去すること。
 - ③整備点検された歯科用、及び歯科技工用回転駆動装置の内、回転数を指定回転数値以下で安定して使用できるものを回転駆動力とすること。
 - ④本材は記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑤本材は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
- ①目の損傷を防ぐ為に、保護眼鏡等を使用すること。
 - ②万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。
 - ③本材及び、切粉の飛散に備え保護カバー、集塵等をして周囲の安全を確保し、粉塵による人体への影響を避けるため、公的機関が許可した防塵マスクなどを使用し、集塵を吸入しないこと。
 - ④本材使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、かゆみ、痺れ等の過敏症が現れたら使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- [保管方法]
- ・常温常湿で保管すること
 - ・外圧（物理的負荷）及び汚染を避けること。
 - ・直射日光の当たる場所には保管しないこと。
 - ・本材は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。
- [使用期限]
- ・製造より、5 年以内に使用すること。
 - ・使用期限は容器に記載

【保守・点検に係る事項】

- ・本材に不純物が入っていないか確認すること。