

*2017 年 10 月第 (3 版) 新規記載要領に基づく改定
2006 年 3 月 14 日作成 (第 2 版)
2003 年 1 月 10 日作成 (新様式第 1 版)

医療機器届出番号 : 27B3X00094Y07001

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス (16189000)

IQ コンパクトワックス

【形状・構造及び原理等】

- 1) 成分
天然蜜蝋
- 2) 形状
45g 及び 8g

【使用目的、効能又は効果】

- ・ロストワックス法に用いるキャストイングワックスでインレ一、クラウン、ブリッジ等のワックスアップに用いる。

【使用方法等】

- 1) 加熱されたインスツルメントで、少量ずつ分離材が塗布された石膏模型に盛り上げていく。
- 2) 過不足部分を盛り足したり、削ったりしてクラウン、ブリッジ等を完成します。
- 3) 埋没は、通常方法に従い作業してください。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
 - ①本材は可燃性なので、使用の際、火傷をしないよう注意する事。
 - ②使用及び保管場所には、消火装置を備える事。
 - ③本材は説明書に記載の用途以外には使用しない事。
 - ④本材は歯科医療有資格者以外は使用しない事。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①本材の使用により発疹、湿疹、発赤、腫瘍、かゆみ、かぶれ等の過敏反応が現れた術者は、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受ける事。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・室温保管
- ・本材は高温となる場所 (ストーブの側、直射日光の当たる場所など) に保管しない事。
- ・本材は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しない事。
- ・本材は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理する事。

[使用期限]

- ・使用期限は商品に明記しています。

【保守・点検に係わる事項】

- ・不純物が入っていないか確認する事。

【製造販売業者又は製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 内外歯材株式会社
住所 : 〒543-0062
大阪府大阪市天王寺区逢阪 2-3-10
電話番号 : 06-6771-5553
FAX 番号 : 06-6779-7518
外国製造所 : YETI DENTAL 社
国名 : ドイツ